

NOME TÉCNICO: CONTAINERS EM GERAL
NOME COMERCIAL: CONTAINERS PARA TRANSPORTE E ESTERILIZAÇÃO ORTOSINTESE
REGISTRO ANVISA: 81202190001

1 – DESCRIÇÃO
Os Containers para Transporte e Esterilização Ortosintese são destinados para transporte e esterilização de instrumentais e implantes médico-cirúrgicos fabricados pela Ortosintese. Os containers são produzidos polietileno. Abaixo estão os modelos disponíveis:

Referência	Descrição
0701/05	CAIXA DE IMPLANTES PARA PEQUENOS FRAGMENTOS (COMERCIAL)
0701/06	KIT DE INSTRUMENTAL PARA PEQUENOS FRAGMENTOS (COMERCIAL)
0703/01	KIT CIRURGICO PLACA TUBO
0703/05	IMPLANTES PLACA TUBO
0703/06	INSTRUMENTAIS PLACA TUBO
0704/01	KIT CIRURGICO PLACA TUBO E PARAFUSO SDQ E SDC
0704/05	INSTRUMENTAL SDQ E SDC
0704/06	IMPLANTES PLACA TUBO E PARAFUSO DESLIZANTE SDQ E SDC
0707/05	KIT DE IMPLANTES PARA GRANDES FRAGMENTOS
0707/06	KIT DE INSTRUMENTAL GRANDES FRAGMENTOS EM RADEL
0709/01	KIT CIRURGICO PARAFUSO DE INTERFERENCIA
0709/05	KIT DE INSTRUMENTAL PARA PARAFUSO DE INTERFERENCIA
0711/01	KIT CIRURGICO CANULADO Ø 7,0
0711/05	INSTRUMENTAL CANULADO Ø 7,0
0711/06	PARAFUSOS CANULADOS Ø 7,0
0713/01	KIT CIRURGICO ORTOLOCK UMERAL
0713/05	INSTRUMENTAL ORTOLOCK UMERAL
0713/06	IMPLANTES ORTOLOCK UMERAL
0721/01	CAIXA E BANDEJA ORTOLOCK TIBIAL CANULADO
0721/05	INSTRUMENTAL ORTOLOCK TIBIAL CANULADO
0721/06	IMPLANTES ORTOLOCK TIBIAL CANULADO (INOX)
0729/01	KIT CIRURGICO ORTOLOCK FEMORAL CANULADO (INOX)
0729/05	INSTRUMENTAL ORTOLOCK FEMORAL CANULADO
0729/06	IMPLANTES ORTOLOCK FEMORAL CANULADO (INOX)
0729/07	ORTOLOCK FEMORAL CANULADO CX03 (IMPLANTES)
0729/08	ORTOLOCK FEMORAL CANULADO CX04 (IMPLANTES)
0736/01	KIT CIRURGICO DE MASTER
0736/05	CAIXA DE INSTRUMENTAL DE MASTER
0736/06	ESTOJOS PARA INSTRUMENTAL DE MASTER 02
0741/01	KIT CIRURGICO PROTESE BIPOLAR
0741/05	INSTRUMENTAL BIPOLAR
0742/01	KIT CIRURGICO PROTESE BIPOLAR DE MAGNUS
0742/05	INSTRUMENTAL BIPOLAR DE MAGNUS
0743/01	KIT CIRURGICO PROTESE DE QUADRIL BIPOLAR - MULLER
0743/05	PROTESE DE QUADRIL BIPOLAR - MULLER INSTRUMENTAL
0744/01	KIT CIRURGICO NAO CIMENTADA
0744/05	INSTRUMENTAL NAO CIMENTADA
0744/06	ESTOJO PARA INSTRUMENTAL NAO CIMENTADA (ACETABULAR)

①

Referência	Descrição
0746/01	KIT CIRURGICO PLACA ANGULADA
0746/05	INSTRUMENTAL PLACA ANGULADA
0746/06	IMPLANTES PLACA ANGULADA
0748/01	KIT CIRURGICO PARAFUSO CORTICAL CANULADO Ø 3,5
0748/05	INSTRUMENTAIS CANULADO Ø 3,5
0748/06	PARAFUSOS CORTICAL CANULADO Ø 3,5
0750/01	KIT CIRURGICO PARAFUSO CORTICAL CANULADO Ø 4,5
0750/05	INSTRUMENTAL PARA PARAFUSO CORTICAL CANULADO Ø 4,5
0750/06	PARAFUSOS CORTICAL CANULADO Ø 4,5
0756/01	KIT CIRURGICO SIGNUS PROXIMAL (INOX)
0756/05	IMPLANTES PARA SPN (INOX)
0756/06	INSTRUMENTAL PARA SPN
0756/07	IMPLANTES PARA SPN (TITANIO)
0758/06	PARAFUSOS CORTICAL CANULADO Ø 3,5
0760/01	KIT CIRURGICO THOMPSON
0760/05	INSTRUMENTAL THOMPSON
0761/01	KIT CIRURGICO GANCHO EVOLUTION PLUS PARA ESCOLIOSE
0761/04	KIT INSTRUMENTAL DE GANCHO EVOLUTION PLUS PARA ESCOLIOSE
0761/05	KIT IMPLANTES GANCHO EVOLUTION PLUS PARA ESCOLIOSE
0763/01	KIT CIRURGICO OSTEOTOMIA PEDIATRICA E ADOLESCENTE
0763/05	INSTRUMENTAL OSTEOTOMIA PEDIATRICA E ADOLESCENTE
0763/06	IMPLANTES OSTEOTOMIA PEDIATRICA E ADOLESCENTE
0765/01	KIT CIRURGICO MINI FRAGMENTOS
0765/05	INSTRUMENTAL MINI FRAGMENTOS
0765/06	IMPLANTES MINI FRAGMENTOS
0767/01	KIT CIRURGICO MICRO FRAGMENTOS
0767/05	INSTRUMENTAL MICRO FRAGMENTOS
0770/01	KIT CIRURGICO CAGE RETANGULAR PEEK
0770/02	KIT CIRURGICO GAIOLA RETANGULAR TITANIO
0770/05	INSTRUMENTAL GAIOLA RETANGULAR
0770/06	IMPLANTES GAIOLA RETANGULAR PEEK
0770/07	IMPLANTES GAIOLA RETANGULAR TITANIO
0772/01	KIT CIRURGICO CABO DE CERCLAGEM
0772/05	INSTRUMENTAL CABO DE CERCLAGEM
0772/06	IMPLANTES CABO DE CERCLAGEM
0776/01	KIT CIRURGICO FIXADOR ILIZAROV
0776/05	ESTOJO PARA KIT DE FIXADOR ILIZAROV
0776/07	ESTOJO KIT DE FIXADOR ILIZAROV (3)
0778/01	KIT CIRURGICO PROTÊSE DE QUADRIL TIPO MOORE
0780/01	KIT CIRURGICO PROTÊSE DE OMBRO
0780/05	INSTRUMENTAL PARA PROTÊSE DE OMBRO
0792/01	KIT CIRURGICO MAGNUS
0792/05	INSTRUMENTAL DE MAGNUS
0792/06	MAGNUS CX02 (FEMORAL)
0804/01	KIT CIRURGICO PLACA MINUS - S
0804/02	KIT CIRURGICO PLACA MINUS - T
0804/05	INSTRUMENTAL PLACA MINUS
0804/06	IMPLANTES PLACA MINUS INOX
0804/07	IMPLANTES PLACA MINUS TITANIO

②

0806/01	KIT CIRURGICO CAGE QUADRADO
0806/05	INSTRUMENTAL CAGE QUADRADO
0806/06	IMPLANTES CAGE QUADRADO
0808/05	IMPLANTES PEQ. FRAGMENTOS COM BLOQUEIO
0808/06	INSTRUMENTAL PEQ. FRAGMENTOS COM BLOQUEIO
0808/07	PARAFUSOS PEQ. FRAGMENTOS COM BLOQUEIO

Referência	Descrição
0809/01	KIT CIRURGICO MULLER
0809/05	KIT INSTRUMENTAL MULLER
0810/01	KIT CIRURGICO PROTESE DE MULLER
0810/05	INSTRUMENTAL TIPO MULLER
0821/01	KIT CIRURGICO FIXADOR TUBULAR
0821/05	CAIXA INSTRUMENTAL FIXADOR TUBULAR
0821/06	CAIXA IMPLANTES FIXADOR TUBULAR
0823/01	KIT CIRURGICO PEQUENOS FRAGMENTOS INOX (OPCAO 01)
0823/02	KIT CIRURGICO PEQUENOS FRAGMENTOS TITANIO (OPCAO 01)
0823/03	KIT CIRURGICO PEQUENOS FRAGMENTOS INOX (OPCAO 02)
0823/04	KIT CIRURGICO PEQUENOS FRAGMENTOS INOX (OPCAO 03)
0823/05	IMPLANTES PEQ. FRAGMENTOS TITANIO (OPCAO 01)
0823/06	INSTRUMENTAL PEQ. FRAGMENTOS (OPCAO 01)
0823/07	BANDEJA PARA PARAFUSOS PEQUENOS FRAGMENTOS (OPÇÃO 01)
0823/08	PARAFUSOS PEQ. FRAGMENTOS TITANIO (OPCAO 01)
0823/09	IMPLANTES PEQ. FRAGMENTOS INOX (OPCAO 01)
0823/10	PARAFUSOS PEQ. FRAGMENTOS INOX (OPCAO 01)
0823/11	IMPLANTES PEQ. FRAGMENTOS INOX (OPCAO 02)
0823/12	INSTRUMENTAL PEQ. FRAGMENTOS (OPCAO 02)
0823/13	PARAFUSOS PEQ. FRAGMENTOS INOX (OPCAO 02)
0823/14	IMPLANTES PEQ. FRAGMENTOS INOX (OPCAO 03)
0823/15	INSTRUMENTAL PEQ. FRAGMENTOS (OPCAO 03)
0823/16	PARAFUSOS PEQ. FRAGMENTOS INOX (OPCAO 03)
0823/17	KIT CIRURGICO PEQUENOS FRAGMENTOS (OPÇÃO 02 - TITANIO)
0823/18	KIT CIRURGICO PEQUENOS FRAGMENTOS INOX (OPCAO 04)
0823/19	KIT CIRURGICO PEQUENOS FRAGMENTOS TITANIO (OPCAO 04)
0823/20	IMPLANTES PEQ. FRAGMENTOS (OPÇÃO 02 - TITANIO)
0823/21	PARAFUSOS PEQ. FRAGMENTOS (OPÇÃO 02 - TITANIO)
0823/22	INSTRUMENTAL PEQ. FRAGMENTOS (OPCAO 04)
0823/23	IMPLANTES PEQ. FRAGMENTOS INOX (OPCAO 04)
0823/24	PARAFUSOS PEQ. FRAGMENTOS INOX (OPCAO 04)
0823/25	IMPLANTES PEQ. FRAGMENTOS TITANIO (OPCAO 04)
0823/26	PARAFUSOS PEQ. FRAGMENTOS TITANIO (OPCAO 04)
0823/28	INSTRUMENTAL PEQ. FRAGMENTOS (OPCAO 01)
0835/08	BANDEJA DE PARAFUSOS E PLACA CERVICAL
0837/01	KIT CIRURGICO DE PLACA CERVICAL
0837/05	INSTRUMENTAL PARA PLACA CERVICAL
0837/06	PLACA CERVICAL E PARAFUSOS
0840/01	KIT CIRURGICO GRANDES FRAGMENTOS (INOX)
0840/02	KIT CIRURGICO GRANDES FRAGMENTOS (TITANIO)
0840/03	KIT CIRURGICO GRANDES FRAGMENTOS (SEM BLOQUEIO - S)
0840/05	INSTRUMENTAL GRANDES FRAGMENTOS

③

0840/06	IMPLANTES GRANDES FRAGMENTOS (INOX)
0840/07	PARAFUSOS GRANDES FRAGMENTOS (INOX)
0840/08	IMPLANTES GRANDES FRAGMENTOS (TITANIO)
0840/09	PARAFUSOS GRANDES FRAGMENTOS (TITANIO)
0840/10	INSTRUMENTAL DE GRANDES FRAGMENTOS SEM BLOQUEIO
0840/11	IMPLANTES DE GRANDES FRAGMENTOS (SEM BLOQUEIO - S)
0840/12	PARAFUSOS DE GRANDES FRAGMENTOS SEM BLOQUEIO
0842/01	KIT CIRURGICO SPOTORNO
0842/05	INSTRUMENTAL SPOTORNO
0842/06	ESTOJO PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO SPOTORNO (ACETABULAR)
0848/01	KIT CIRURGICO DE COLUNA EVOLUTION PLUS - BAIXO PERFIL
0848/05	KIT INSTRUMENTAL DE COLUNA EVOLUTION PLUS
0848/06	KIT IMPLANTES EVOLUTION PLUS - BAIXO PERFIL

Referência	Descrição
0849/01	KIT CIRURGICO JOELHO NKS PLUS
0849/02	KIT CIRURGICO JOELHO NKS PLUS - COMPLEMENTAR
0849/03	ESTOJOS DE INSTRUMENTAL JOELHO NKS PLUS 01
0849/05	INSTRUMENTAL JOELHO NKS PLUS
0849/06	INSTRUMENTAL JOELHO NKS PLUS - COMPLEMENTAR
0850/01	KIT CIRURGICO DE REVISAO TIPO WAGNER
0850/05	INSTRUMENTAL DE REVISAO PARA QUADRIL TIPO WAGNER
0850/06	ESTOJO 02 PROTESE DE REVISAO PARA QUADRIL
0855/01	KIT CIRURGICO BUCO MAXILO
0855/05	INSTRUMENTAL BUCO MAXILO
0855/06	IMPLANTES BUCO MAXILO
0855/07	PORTA PARAFUSOS MINI - Ø 2,0 MM
0855/08	BANDEJA P/ PARAFUSOS MINI-AUTO DRIVE 2,0 MM
0855/09	BANDEJA P/ PARAFUSOS MICRO 1,2 MM
0855/10	BANDEJA PARAFUSOS MICRO-AUTO DRIVE 1,2 MM
0855/11	PORTA PARAFUSOS MIDI FACE Ø 1,6 MM
0855/12	PORTA PARAFUSOS MAXI Ø 2,4 MM
0855/13	BANDEJA COM FURO PARA 2,4
0855/14	BANDEJA SISTEMA DE BUCO MAXILO 2,0
0855/15	BANDEJA COM FURO PARA 1,6
0856/01	BANDEJA BUCO MAXILO - MINI
0856/02	BANDEJA B BUCO MAXILO-MAXI
0856/03	BANDEJA DE BUCO MAXILO - MICRO/MIDFACE
0857/01	KIT CIRURGICO REVISAO DE PROTESE MODULAR
0857/05	INSTRUMENTAL REVISAO DE PROTESE MODULAR
0857/06	IMPLANTES REVISAO DE PROTESE MODULAR
0858/01	KIT CIRURGICO CAGE TRANSFORAMINAL
0858/05	INSTRUMENTAL CAGE TRANSFORAMINAL
0858/06	IMPLANTES CAGE TRANSFORAMINAL
0859/01	KIT CIRURGICO OCCIPITO CERVICAL
0859/02	BANDEJA DO KIT OCCIPITO CERVICAL
0859/03	ESTOJO PARA INSTRUMENTAL DE OCCIPITO CERVICAL (CX2)
0859/04	BANDEJA DO KIT OCCIPITO CERVICAL
0859/05	INSTRUMENTAL OCCIPITO CERVICAL
0859/06	IMPLANTES OCCIPITO CERVICAL

④

0860/01	KIT CIRURGICO PLACA MIPLATE
0860/05	IMPLANTES PLACA MIPLATE
0860/06	INSTRUMENTAL MIPLATE
0861/01	KIT CIRURGICO VOLFIX (TITANIO)
0861/02	KIT CIRURGICO VOLFIX (INOX)
0861/03	BANDEJA DE PARAFUSOS PARA PLACA VOLFIX
0861/05	INSTRUMENTAIS VOLFIX
0861/06	IMPLANTES VOLFIX (TITANIO)
0861/07	PARAFUSOS VOLFIX (TITANIO)
0861/08	IMPLANTES VOLFIX (INOX)
0861/09	PARAFUSOS VOLFIX (INOX)
0861/17	BANDEJA PARAFUSOS VOLFIX 2808 COM BASE
0862/01	KIT CIRURGICO PARA HASTE FIN
0862/05	INSTRUMENTAL PARA HASTE FIN
0862/06	IMPLANTE HASTE FIN
0863/01	KIT CIRURGICO GANCHO STE
0863/05	KIT DE GANCHO STE
0863/06	INSTRUMENTAL PARA GANCHO STE
0864/01	KIT CIRURGICO PLACA OSTEOLOCK
0864/05	INSTRUMENTAL PARA PLACA OSTEOLOCK
0864/06	IMPLANTES OSTEOLOCK


Referência	Descrição
0865/01	KIT CIRURGICO COMPRESSION SYSTEM OF PHYSICS
0865/05	INSTRUMENTAL COMPRESSION SYSTEM OF PHYSICS
0865/06	BANDEJA COM PARAFUSOS TRANSFISARIOS
0865/07	BANDEJA PARA PARAFUSOS TRANSFISARIOS
0866/01	KIT CIRURGICO PARA MINI HASTE FIN
0866/05	INSTRUMENTAL PARA HASTE MINI FIN
0866/06	IMPLANTE PARA MINI HASTE FIN
0866/07	ESTOJO MINI HASTE FIN
0866/08	TUBO PARA HASTE MINI FIN Ø1,2
0866/09	TUBO PARA HASTE MINI FIN Ø1,5
0866/10	TUBO PARA HASTE MINI FIN Ø1,0
0867/01	KIT CIRURGICO OCTO PLATE
0867/05	INSTRUMENTAL OCTO PLATE
0867/06	IMPLANTES OCTO PLATE
0868/01	KIT CIRURGICO PROTESE UNION - MULTI-LOCK
0868/02	KIT CIRURGICO PROTESE UNION - MULTI-LOCK - COMPLEMENTAR
0868/05	INSTRUMENTAIS PARA PROTESE DE UNION - MULTI-LOCK
0868/07	INSTRUMENTAIS PARA PROTESE DE UNION - MULTI-LOCK - COMPLEMENTAR
0870/01	BANDEJA DE PLACA OLECRANO
0870/02	BANDEJA PLACA DE UMEMO POSTERO LATERAL E DISTAL MEDIAL
0870/03	BANDEJA PLACA DE PUNHO
0870/04	BANDEJA VOLFIX
0870/05	BANDEJA DE CLAVICULA
0870/06	BANDEJA DE CLAVICULA DISTAL
0870/07	BANDEJA PARA PLACA HOOK
0870/08	BANDEJA PLACA SPIN
0870/09	BANDEJA PARA PLACA DE UMEMO ANTERO MEDIAL E LATERAL

⑤

0870/10	BANDEJA PARA PLACA UMEMO POSTERO LATERAL
0871/01	KIT CIRURGICO ORTOLOCK TIBIAL DISTAL STS
0871/05	ESTOJO INSTRUMENTAL - ORTOLOCK TIBIAL DISTAL STS
0871/06	ESTOJO IMPLANTES - ORTOLOCK TIBIAL DISTAL STS
0872/01	KIT CIRURGICO PARA MEMBROS SUPERIORES
0872/02	KIT CIRURGICO PARA MEMBROS SUPERIORES INSTRUMENTAL
0872/03	KIT CIRURGICO PARA MEMBROS SUPERIORES PLACAS
0872/04	KIT CIRURGICO PARA MEMBROS SUPERIORES PARAFUSOS
0873/05	ESTOJO PARA CERVICAL TITAN (INSTRUMENTAL)
0873/06	ESTOJO PARA CERVICAL TITAN (IMPLANTES)
0874/05	ESTOJO PARA MINI MICRO (INSTRUMENTAL)
0874/06	ESTOJO PARA MINI MICRO (IMPLANTES)
0874/07	BANDEJA MINIMICRO 1,5 MM
0874/08	BANDEJA MINIMICRO 2,0 MM
0874/09	BANDEJA MINIMICRO 2,4 MM
0874/10	BANDEJA MINIMICRO 2,7 MM
0875/01	KIT PARA PLACAS DE RECONSTRUÇÃO
0875/05	ESTOJO PARA PLACA DE RECONSTRUÇÃO (IMPLANTES)
0875/06	ESTOJO PARA PLACA DE RECONSTRUÇÃO (INSTRUMENTAL)
0875/07	ESTOJO PARA PLACA DE RECONSTRUÇÃO (PARAFUSOS)
0876/05	KIT CERVICAL TITAN

2 – FORMAS DE APRESENTAÇÃO
Os Containers para Transporte e Esterilização Ortosintese são fornecidos em embalagens unitárias não estéreis de filme de polietileno de baixa densidade e espessura de 120 microns, atóxico e inodoro, juntamente com o rótulo de identificação.
A Instrução de Uso não está disponível na embalagem, a mesma poderá ser consultada de forma eletrônica acessando a página www.ortosintese.com.br.
Esta condição está informada no rótulo de cada produto. Caso necessário, o formato impresso pode ser solicitado para a empresa pelo e-mail: instrucoesdeuso@ortosintese.com.br

Exemplo de produto médico acondicionado em filme plástico de polietileno na forma em que será entregue ao consumo

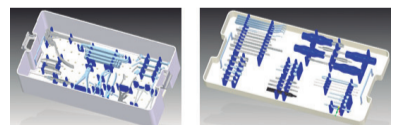

3 – INDICAÇÕES
Compostos por módulos separadores / organizadores responsáveis pela acomodação correta dos materiais, os containers são destinados para transporte e acondicionamento de implantes e instrumentais e também são utilizados no processo de esterilização desses produtos.

4 – CONTRAINDICAÇÕES
Os containers não possuem contraindicações, no entanto reforçamos que é essencial uma inspeção regular e pontual em todos os produtos. Se identificados fora das condições ideais de uso, os mesmos devem ser remetidos para manutenção ou substituição junto ao distribuidor.

5 – AVISOS E PRECAUÇÕES
Por se tratar de um material utilizado em ambiente cirúrgico, o mesmo deverá ser manuseado por profissionais devidamente habilitados e treinados.
As instruções de uso devem ser cuidadosamente verificadas antes do uso inicial.
Os containers apresentados podem ser reutilizados sempre após limpeza e esterilização, porém advertimos os usuários quanto aos seguintes itens:
a) Produtos que eventualmente tenham sofrido quedas podem ser danificados, neste caso os mesmos deverão ser enviados para manutenção ou substituição. É importante salientar que estes produtos deverão ser utilizados exclusivamente para os fins que foram indicados e projetados.
b) A Ortosintese recomenda uma inspeção regular e pontual em todos os containers para verificar possíveis desgastes ou deformações, essa inspeção pode ser controlada de acordo com os critérios de manutenção estabelecidos por cada instituição;
c) Todos os produtos devem ser limpos e esterilizados em autoclave a vapor antes do uso. Durante a limpeza não utilizar esponjas ou agentes abrasivos.

6 – ESTERILIZAÇÃO
Os containers devem ser esterilizados por Autoclave a vapor e segundo os protocolos de validação da ISO 17865-1/2010 – Esterilização de produtos para saúde – Vapor Parte: 1 Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde.

7 - CUIDADOS ESPECIAIS SOBRE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO PRODUTO MÉDICO
7.1 ARMAZENAMENTO
O armazenamento deve ser feito em local seco e arejado, protegidos da luz solar direta, a temperatura máxima de 50°C e umidade relativa entre 20 e 80%.
O local de armazenamento do produto deve estar limpo, seco e iluminado de forma a manter as condições ideais de armazenamento e transporte, assim como, a sua integridade física e química.










⑥

7.2 TRANSPORTE

O transporte deve ser feito nas mesmas condições de armazenagem com todos os cuidados de se transportar produto frágil. Os cuidados a serem tomados no transporte estão demonstrados na embalagem, assegurando assim, proteção ao produto médico desde a expedição até a entrega ao cliente.

08 – MODELO DE ROTULAGEM

REF: xxxxx
LOTE: xxxxxx
Registro Anvisa nº 812.021.900-01
Descrição: xxxxxxxx
Nome Técnico, Nome e modelo comercial, Matéria – Prima
Quantidade: xx
Fabricado: xxx/xx/xxxxx
Validade: Indeterminada
Verificado: sigla do responsável pela verificação
Frases: "Proibido reprocessar"
Frases: "Produto não estéril"
Técnico Responsável: Carlos Macoto Nakamura – CREA SP – 0601828973

	Símbolo do Fabricante
	Símbolo de validade
	Símbolo de advertência para verificar instrução de uso
	Símbolo de produto frágil
	Símbolo de uso único e palavra "uso único"
	Símbolo de indicação de temperatura
	Símbolo data fabricação
	Símbolo da marcação CE (quando aplicável)
	Símbolo Autorização do Representante Comunidade Européia

812.021.900-01 - Rev 00.dez.2016

European Authorized Representative
Obelis S.A
Bd. Général Wahis 53 - 1030 Brussels, BELGIUM
Tel: +(32) 2. 732.59.54 - Fax: +(32) 2.732.60.03
E-Mail : mail@obelis.net



ORTOSINTESE

ORTOPEDIA | EQUIPAMENTOS

ORTOSINTESE IND. E COM. LTDA.
Avenida Nelson Palma Travassos, 651 –
City Empresarial Jaraguá – CEP 02998-000
São Paulo – SP – Brasil
Fone: (005511) 3948-4000 - Fax: (005511) 3948-4010
E-mail: ortosintese@ortosintese.com.br

⑦

⑧