

INSTRUÇÕES DE USO

Nome Comercial: INSTRUMENTAL CIRÚRGICO NÃO ARTICULADO NÃO CORTANTE ORTOSINTESE

Nome Técnico: INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

Registro ANVISA: 10223710080

1. DESCRIÇÃO

Os INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES ORTOSINTESE são fabricados para utilização em procedimentos médicos cirúrgicos ou ambulatoriais. São fabricados em aço inoxidável AISI 304 (conforme norma ASTM A276a - Standard Specification for Stainless Steel Bars and Shapes) e/ou AISI 420B (conforme norma ASTM F899 - Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments).

Os modelos disponíveis são:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1209	CHAVE 10 X 13
1225	CHAVE ALLEN Ø 5,0
1227	CHAVE Ø 16,0
1618	PERFURADOR PUNÇÃO GRANDE
1619	GUIA DE BROCA GRANDE
1622	MEDIDOR DE PAQUÍMETRO
1625	CHAVE CURTA P/ PARAFUSOS Ø 2,0 E Ø 2,4
1626	CHAVE CURTA PARA PARAFUSO Ø 2,0MM
1627	CHAVE LONGA P PARAFUSO 2,0 E 2,4MM
1632	GUIA DE ENXERTO
1633	IMPACTOR RETO DE ENXERTO
1634	IMPACTOR CURVO DE ENXERTO
1635	GUIA DE REDUÇÃO
1636	RODA DENTADA
1637	CHAVE SEXTAVADA PEQUENA
1638	CHAVETUBULAR 6MM
1639	CHAVE TUBULAR 11MM
1664	APOIO DO BATEDOR
1666	EXTRATOR FEMORAL
1667	PINÇA PARA PLACA TIBIAL
1668	GUIA MEDIDOR FEMORAL
1669	IMPACTOR TIBIAL
1670	EXTRATOR INTRAMEDULAR
1672	MEDIDOR FEMORAL
1673	GUIA DE ALINHAMENTO EXTRAMEDULAR
1674	CABO UNIVERSAL
1675	EXTRATOR TIBIAL
1676	GUIA DE CORTE TIBIAL 7°
1678	IMPACTOR TIBIAL
1679	IMPACTOR FEMORAL
1680	GUIA DE ALINHAMENTO ROTACIONAL
1681	GUIA DE CORTE FEMORAL
1684	GUIA DE CORTE VARO/VALGO TIBIAL
1685	GUIA DE CORTE TIBIAL
1688	EXTRATOR
1692	IMPACTOR TIBIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1694	AFASTADOR TIBIAL
1695	AFASTADOR DE TENDÃO PATELAR
1696	GUIA DE BROCA TIBIAL
1697	GUIA DE CORTE FEMORAL DISTAL
1699	GUIA DE CORTE FEMORAL DISTAL
1706	IMPACTOR PEQUENO
1707	IMPACTOR GRANDE
1709	GUIA POSICIONADOR GRANDE
1710	GUIA POSICIONADOR PEQUENO
1712	GUIA DE FIO Ø 1,5MM
1713	GUIA DE FIO Ø 2,5MM
1714	FIO LISO TROCATER Ø 2,0 X 150MM
1715	FIO COM PONTA ROSQUEADA 1,5 X 150MM
1716	FIO Ø 1,25 X 150MM
1717	MEDIDOR
1718	MEDIDOR TORQUÍMETRO
1719	CABO COM ENGATE RÁPIDO
1721	GUIA STOP PARA BROCA
1723	GUIA DEFIO Ø 1,5MM
1724	GUIA DE BROCA Ø 2,8MM
1725	GUIA PROTETOR
1726	GUIA DE FURAÇÃO PARA PLACA ANGULADA
1727	CHAVE SEXTAVADA 2,5MM
1729	AFASTADOR DE GANCHO
1730	AFASTADOR DESCOLADOR
1731	MEDIDOR DE PLACA PEQUENO
1732	MEDIDOR DE PLACA MÉDIO
1733	MEDIDOR DE PLACA GRANDE
1734	CORTADOR MODELADOR DE FIOS
1735	ALINHADOR DE BROCA
1756	CHAVE COM SEXTAVADO INTERNO
1757	GUIA ORIENTADOR DO GUIA DE CORTE TIBIAL
1759	GUIA DE ALINHAMENTO
1766	TROQUÍMETRO 3,5 NM P SISTEMA LCP GR. FRAG.
1769	GUIA ORIENTADOR DE CORTE
1786	GUIA DE BROCA
1790	CHAVE EXTRATORA PARA REVISÃO
1792	GUIA DA FRESA ACETABULAR
1798	GUIA POSICIONADOR
1800	GUIA DE BROCA Ø 2,0 / 2,5MM
1801	GUIA HASTE TIBIAL
1803	CHAVE EM T SEXTAVADA P TORQUIMETRO
1825	GUIA DE BROCA Ø 3,2 E Ø 4,5MM
1826	GUIA DE MACHO Ø 6,5 E BROCA Ø 3,2MM
1827	CHAVE SEXTAVADA COM ENGATE RÁPIDO
1833	GUIA PARAFUSO DE EXTRAÇÃO
1834	GUIA DO FIO Ø 2,0 X 280MM
1835	CHAVE EM T

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1836	GUIA DE BROCA Ø 3,2 E Ø 4,5MM
1837	GUIA DE BROCA Ø 4,3 E Ø 4,5MM
1838	GUIA DE BROCA Ø 4,3MM
1839	GUIA DO FIO Ø 2,0MM
1840	MODELADOR DE PLACAS
1858	PINÇA ANGULADA
1862	GUIA DE BROCA
1864	GUIA DE BROCA
1865	AFASTADOR
1866	AFASTADOR
1867	GUIA DE BROCA
1920	GUIA DE BROCA Ø 2,5 / 3,5MM
1947	CHAVE POSICIONADORA DO CAGE
1959	MEDIDOR DE COLO
1971	GUIA DA CHAVE DE INSERÇÃO
1972	CHAVE DE INSERÇÃO DA GAIOLA
1973	CHAVE SEXTAVADA
1974	CHAVE ROSQUEADA
1983	CHAVE SEXTAVADA 6MM DUPLO CARDAN
1984	PARAFUSO DE CONEXÃO
1985	IMPACTOR DE ENXERTO
1986	GUIA CABO DO MEDIDOR
1987	GUIA DEMONTAGEM
1988	ADAPTADOR DO IMPACTOR ORTOLOCK
1989	CHAVE CACHIMBO
1999	GUIA DE BROCA Ø 2,8MM
2004	IMPACTOR FINAL
2006	CHAVE "T"
2007	CHAVE DE GIGLI
2009	GUIA DE ACETÁBULO MULLER
2010	IMPACTOR MULLER
2011	EXTRATOR LONGO DE CABEÇA DE FÊMUR
2015	GUIA DE ACETÁBULO MULLER
2017	GUIA DE BROCA
2023	IMPACTOR DE CHARNLEY
2027	GUIA DO FIO CHARNLEY
2031	IMPACTOR DE CÁPULA ACETABULAR
2035	AFASTADOR INICIAL DE PRÓTESE
2038	CURETA PEQUENA
2039	CURETA MÉDIA
2041	CURETA DENTADA
2042	GUIA ÊMBOLO PEQUENO
2043	GUIA ÊMBOLO MÉDIO
2044	GUIA ÊMBOLO GRANDE
2049	AFASTADOR COM PINOS
2050	AFASTADOR
2051	IMPACTOR DE THOMPSON
2057	EXTRATOR DE AR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2058	GUIA DO TÓRAX
2059	EXTRATOR DE ENXERTO
2060	GUIA
2066	MODELADOR RETORCEDOR DE PLACAS
2069	GUIA DE BROCA 3,2MM
2070	GUIA DE BROCA 3,2MM
2071	GUIA DE BROCA 3,2MM
2074	GUIA DE PERFURAÇÃO PARA PLACAS E PARAFUSOS
2075	CHAVE SEXTAVADA
2078	GUIA DE BROCA 3,2MM PARA PLACA
2080	IMPACTOR E POSICIONADOR
2083	AFASTADOR HOHMAN PONTA LARGA
2085	IMPACTOR DE INSERTO 22MM
2086	IMPACTOR DE INSERTO 28MM
2087	IMPACTOR DE ACETÁBULO
2091	GUIA DE BROCA NEUTRO EXCÊNTRICO
2092	GUIA DA FRESA
2094	FRESA MACHO Ø 2,7MM
2096	AFASTADOR DE RAIZ
2097	CHAVE DA PINÇA COMPRESSORA
2098	GUIA DE BROCA COM VISOR Ø 2,0MM
2107	MODELADOR RETORCEDOR DE PLACAS PEQUENOS FRAGMENTOS
2108	CHAVE SEXTAVADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2109	AFASTADOR ANGULADO
2113	MEDIDOR DE CAPSULA BIPOLAR
2114	MEDIDOR
2115	MEDIDOR
2117	CHAVE EM T
2118	EXTRATOR DA HASTE
2119	PRÓTESE DE PROVA FEMORAL
2121	IMPACTOR EXTRATOR DE ANGULADAS
2122	IMPACTOR FINAL DE ANGULADAS
2123	GUIA GONIÔMETRO P/ PLACAS ANGULADAS
2124	GUIA TRÍPLICE PARA PLACAS ANGULADAS
2125	GUIA DO CINZEL DE ANGULADAS
2126	EXTRATOR DO IMPACTOR
2127	GUIA DA PLACA CONDILAR
2128	CHAVE HEXAGONAL
2129	GUIA POSICIONADOR DE ANGULADAS 20°, 60°, 100°
2130	GUIA POSICIONADOR DE ANGULADAS 30°, 70°, 80°
2131	GUIA POSICIONADOR DE ANGULADAS 40°, 50°, 90°
2132	POSICIONADOR 70°, 90°, 110°
2135	IMPACTOR EXTRATOR ANG. P/ CRIANÇA/ADOLESCENTE
2144	IMPACTOR DE KUNTSCHER
2145	EXTRATOR
2146	EXTRATOR PARA PREGO
2152	EXTRATOR DE ANEL
2153	EXTRATOR CUNHA
2155	EXTRATOR
2156	IMPACTOR INICIAL DE ENDER
2157	MODELADOR RETORCEDOR DE ENDER
2158	IMPACTOR FINAL DE ENDER
2159	GUIA DE MONTAGEM PARA PRÓTESE ACETABULAR
2161	EXTRATOR
2162	IMPACTOR DE O.P.S.
2163	GUIA POSICIONADOR PARA PINO OPS
2164	CHAVE P/ POSICIONADOR DE O.P. S.
2165	CHAVE CATRACA P/ PINO O.P.S.
2169	MEDIDOR CABEÇA FÊMUR
2171	CHAVE EM T COM MANDRIL
2174	GUIA DE BROCA
2175	MODELADOR DE FIOS
2178	EXTRATOR
2179	AFASTADOR
2180	GUIA BROCA LONGO
2181	MODELADOR
2190	CHAVE DISTRATORA HARRINGTON GRANDE CURVA
2191	CHAVE DISTRATORA HARRINGTON GRANDE RETA
2192	CHAVE DISTRATORA HARRINGTON PEQ CURVA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2193	CHAVE DISTRATORA HARRINGTON PEQ RETA
2194	CHAVE DISTRATORA HARRINGTON GRANDE RETA
2201	GUIA ÂNGULO 95°
2209	IMPACTOR DE PLACA
2210	GUIA ANGULADO 150°
2211	GUIA ANGULADO 135°
2212	CHAVE EM T
2214	GUIA 135°
2235	CHAVE COMBINADA 8 A 14MM
2247	AFASTADOR BLOUNT DUAS PONTAS
2248	AFASTADOR BLOUNT UMA PONTA
2249	AFASTADOR HOHMANN
2250	AFASTADOR BENNETT ELEVADOR PAR
2251	AFASTADOR DE JOELHO
2257	IMPACTOR PORCA PARA CABO AIMER
2281	EXTRATOR
2288	CHAVE COMBINADA 10MM
2292	CHAVE L
2343	CHAVE PARA KNOWLES
2347	AFASTADOR OLLIER 40 X 60 X 250 4 GARRAS
2348	AFASTADOR OLLIER 40 X 60 X 250 2 GARRAS
2353	AFASTADOR DE KEY 26MM PERIÓSTEO
2354	AFASTADOR DE KEY 19MM PERIÓSTEO
2355	AFASTADOR DE KEY 13MM PERIÓSTEO
2356	AFASTADOR DE KEY 6MM PERIÓSTEO
2357	AFASTADOR ALLERDYCE DISSECTOR 210
2358	AFASTADOR CUSHING
2360	MARTELO DE AÇO INOXIDÁVEL 350 GR
2361	MARTELO AÇO INOXIDÁVEL 750 GR
2362	MARTELO AÇO INOXIDÁVEL 250 GR
2363	MARTELO DE NYLON 200 GR
2383	EXTRATOR GANCHO PARA EXTRAÇÃO DE CIMENTO
2384	EXTRATOR GANCHO AFIADO PARA EXTRAÇÃO DE CIMENTO
2410	EXTRATOR DE PINOS
2414	CHAVE
2417	CHAVE EXTRATORA
2421	MODELADOR LINEAR
2425	IMPACTOR DE PRÓTESE UMERAL
2426	IMPACTOR GLENÓIDE
2427	AFASTADOR FUKUDA
2429	AFASTADOR GANCHO UMERAL
2430	AFASTADOR UMERAL
2431	AFASTADOR DE GLENÓIDE
2432	AFASTADOR ANTERIOR GLENÓIDE
2434	IMPACTOR P/ RETÂNGULO HARTSCHILD 6MM
2435	IMPACTOR P/ RETÂNGULO HARTSCHILD 5° 4
2436	MODELADOR DE HATSCHILD

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2444	CHAVE SEXTAVADA
2450	GUIA DA FRESA
2453	EXTRATOR DE HASTE
2461	GUIA DE PINO SCHANZ 100MM
2462	GUIA DE PINO SCHANZ 60MM
2468	MARTELO COM CABECA INTERCAMBIÁVEL
2473	CHAVE EM L
2508	CHAVE SEXTAVADA P/ PARAFUSO CANULADO Ø 7,0
2526	AFASTADOR DE PARTES MOLES
2533	EXTRATOR
2538	GUIA DA BROCA
2540	CHAVE T
2544	GUIA PROTETOR
2546	MEDIDOR EXTRA LONGO FEMORAL TIBIAL
2551	MEDIDOR PINO
2553	MEDIDOR DE CAVIDADE INFINITY
2555	GUIA DE ALINHAMENTO DA PORCA
2556	CHAVEGUIA INICIAL
2557	CHAVE SEXTAVADA
2558	GUIA DA HASTE
2559	GUIA INTRODUTORA DA HASTE LONGA
2560	GUIA INTRODUTORA DA HASTE CURTA
2561	GUIA APALPADOR
2562	CHAVE GUIA
2564	CHAVE EM T LONGA
2565	GUIA DA CHAVE POSICIONADORA
2566	GUIA DA CHAVE SEXTAVADA
2573	MODELADOR DA HASTE PAR
2575	CHAVE POSICIONADORA DA HASTE
2576	CHAVE SEXTAVADA P/ GANCHO DDT
2577	IMPACTOR DO BLOQUEADOR DE CIMENTO
2581	IMPACTOR EXTRATOR
2582	IMPACTOR EXTRATOR
2584	GUIA FIO DO CINZEL
2585	GUIA DO OSTEOTOMO
2587	GUIA DE CONEXÃO
2588	GUIA ORIENTADOR DE PREGO
2589	GUIA DE MONTAGEMTIBIAL
2592	GUIA APALPADOR
2596	CHAVE P/ QUEBRA
2604	GUIA FIO 1,4
2605	CHAVE HEXAGONAL
2606	GUIA DA BROCA 4,5 X 3,2
2607	FIO GUIA 1,7 X 180MM
2613	GUIA DA BROCA 7,0 X 3,2
2614	GUIA DE BROCA 9,5 X 7,0
2621	GUIA FIO 1,20
2623	CHAVE SEXTAVADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2625	MEDIDOR 3,5
2626	MEDIDOR 4,5
2627	CHAVE SEXTAVADA
2630	CHAVE BISTURI DUPLO
2631	MEDIDOR DE ENXERTO
2636	GUIA PROTETOR
2637	GUIA DA BROCA
2638	GUIA PROXIMAL PARA ORTOLOCK FEMORAL
2639	GUIA DA BROCA
2641	GUIA DE MONTAGEM FEMORAL
2643	GUIA PARAFUSO DE CONEXÃO
2645	CHAVE AINER
2646	GUIA PINO
2648	GUIA DE BROCA
2649	IMPACTOR EXTRATOR
2650	CHAVE CACHIMBO
2651	CHAVE SEXTAVADA Ø 3,5MM
2652	GUIA SUPORTE DE MONTAGEM
2656	GUIA PARAFUSO
2657	IMPACTOR
2659	GUIA PROTETOR DE ENXERTO
2660	CHAVE SEXTAVADA
2661	CHAVE EM CRUZ
2664	GUIA DE BROCA 16
2665	MODELADOR DE PLACAS
2670	AFASTADOR ANGULADO PAR
2673	CHAVE APLICADOR
2679	MEDIDOR DE PROFUNDIDADE FLEXÍVEL
2687	MEDIDOR PRÓTESE UMERAL
2688	MEDIDOR CABEÇA INTERCAMBIÁVEL CÊNTRICA
2693	IMPACTOR CANULADO
2698	IMPACTOR DO BLOQUEADOR DE CIMENTO
2702	GUIA DO IMPACTOR MÁSTER
2703	IMPACTOR COLAR MÁSTER
2708	IMPACTOR DE CÁPSULA
2715	GUIA DA PLACA
2716	GUIA DA PLACA
2724	CABO EM T
2727	GUIA DO MEDIDOR
2730	GUIA ALINHADOR
2731	GUIA DE EXTENSÃO
2732	GUIA ALINHADOR
2733	GUIA DE CORTE TIBIAL
2734	GUIA ORIENTADOR
2735	GUIA ORIENTADOR DO CORTE
2736	GUIA MEDIDOR DE CORTE POSTERIOR
2737	GUIA DE CORTE ANTERIOR
2738	GUIA DE CORTE POSTERIOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2739	GUIA DE CORTE DISTAL FEMORAL
2740	GUIA ALINHADOR FEMORAL
2743	MEDIDOR DE ALTURA
2747	GUIA DO IMPACTOR
2750	IMPACTOR
2751	GUIA ALINHADOR FEMORAL
2752	GUIA ALINHADOR FEMORAL
2755	IMPACTOR EXTRATOR
2757	GUIA DO IMPACTOR E EXTRATOR
2758	IMPACTOR FEMORAL
2759	EXTRATOR DE PLATÔ
2764	GUIA PATELAR
2770	IMPACTOR DE PROVA
2772	IMPACTOR EXTRATOR
2792	GUIA CAMISA EXTERNA
2793	GUIA CAMISA INTERNA
2794	GUIA APARAFUSADO DA PLACA
2795	GUIA PROTETOR BROCA
2796	GUIA PLACA
2798	CHAVE COM ENGATE RÁPIDO
2799	CHAVE EXTERNA DO PINO DESLIZANTE
2800	CHAVE PARAFUSO CORTICAL 4,5MM
2807	CHAVE INTERNA DO PINO DESLIZANTE
2814	GUIA DO GANCHO PEDICULAR
2815	GUIA DE BROCA 2,0
2816	IMPACTOR PARA GANCHO PEDICULAR
2834	CHAVE HEXAGONAL 5
2835	CHAVE T SEXTAVADA 5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2836	CHAVE CONTRA TORQUE
2837	CHAVE POSICIONADORA
2838	CHAVE GUIA INICIAL
2839	CHAVE REDUTORA
2842	MEDIDOR
2843	CHAVE DE RUPTURA
2845	CABO EM T COM ENGATE RÁPIDO
2845	CHAVE GUIA INICIAL PARA POLIAXIAL
2846	GUIA PROTETOR
2860	GUIA FIO RETO SEM OLIVA 3 X 500MM
2862	GUIA FIO PONTA ANGULADA COM OLIVA 3 X 500MM
2863	GUIA DE MONTAGEM DISTAL
2865	IMPACTOR EXTRATOR
2866	GUIA PARAFUSO DE CONEXÃO
2867	GUIA TUBO INTRAMEDULAR FLEXÍVEL 480
2869	GUIA PARAFUSO DE CONEXÃO
2874	GUIA DE MONTAGEM
2875	CHAVE CACHIMBO 5/8 CANULADA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2877	IMPACTOR DE ENXERTO
2878	IMPACTOR
2879	GUIA DE MONTAGEM
2880	CHAVE INICIAL
2881	CUNHA ESPAÇADORA
2895	IMPACTOR DE NÓ
2897	EXTRATOR DE FIO
2899	MARTELO
2900	GUIA DE PROTEÇÃO HÍSTICA 11,0/8,0
2901	GUIA DA BROCA 8,0/4,0
2904	CHAVE HEXAGONAL GRANDE
2906	CHAVE HEXAGONAL CANULADA
2908	MARTELO DESLIZANTE
2909	IMPACTOR DO MARTELO
2910	CHAVE Ø 4,5
2912	GUIA CANULADO DA CHAVE T
2913	GUIA DE PROTEÇÃO Ø 20/ Ø 17
2914	GUIA DE INSERÇÃO
2915	GUIA DE IMPACTOR DO MARTELO
2919	GUIA DO PARAFUSO DE CONEXÃO
2924	GUIA POSICIONADOR DA PRÓTESE FEMORAL
2931	GUIA DE PROTEÇÃO HÍSTICA 14,0/11,0
2932	GUIA DE BROCA Ø 11,0/Ø2,8
2934	MEDIDOR DE PROFUNDIDADE 2,8
2935	GUIA DE PROTEÇÃO HÍSTICA 8,0/6,5
2936	GUIA DE BROCA 6,5/2,8
2937	GUIA DA BROCA 17,0 / 2,8
2938	GUIA DE LIMPEZA 2,9
2941	MARTELO DE POLIETILENO
2944	CHAVE EM T P/ INTRODUÇÃO E REDUÇÃO
2945	GUIA FIO 2,8 X 350 COM PONTA ROSQUEADA
2947	GUIA ORIENTADOR PARA BLOQUEIO DISTAL
2950	GUIA EM L
2952	GUIA DE PUNÇÃO PARA ARRUELA DENTADA
2955	IMPACTOR ARRUELA
2956	GUIA DE FRESA 9,0MM
2957	CHAVE SEXTAVADA CANULADA Ø 3,5
2958	CHAVE EXTRATOR DO FIO
2963	GUIA PASSA FIO
2964	EXTRATOR DE CABO
2966	EXTRATOR DE CABO
2969	IMPACTOR DE ENXERTO
2971	CHAVE INTRODUTORA
2972	CHAVE EM L SEXTAVADA
2977	IMPACTOR DE ENXERTO
2980	GUIA DE BROCA 2,5
2983	GUIA DE PLACA LONGO
2985	CHAVE DO APLICADOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2986	GUIA DE BROCA 5,0
2987	CHAVE SEXTAVADA CURTA
2988	CHAVE SEXTAVADA LONGA
2989	POSICIONADOR RETO DO IMPLANTE
3015	CHAVE CACHIMBO 8,0MM
3311	GUIA FIO 1,8 X 200MM
3319	GUIA PARAFUSO
3333	GUIA DO MACHO
3334	GUIA DA PLACA
3335	GUIA PINO DO GUIA DE PLACA
3336	GUIA DA CHAVE T
3337	CHAVE T PARA DHS
3338	GUIA DO PINO DA CHAVE EM T DHS
3397	CHAVE ALLEN
3398	CHAVE 16MM
3410	CHAVE COMBINADA 11MM
3415	CHAVE HEXAGONAL
3417	GUIA MÚLTIPLO
3420	MEDIDOR
3421	GUIA DO FIO
3422	GUIA DO MACHO
3424	CHAVE EM L HEXAGONAL
4656	MEDIDOR
4690	GUIA FIO Ø 2,0 X 360MM
4692	GUIA FIO
4807	CHAVE GUIA DE PORCA POLIAXIAL
7004	CHAVE SEXTAVADA 3,5MM LONGA C STOP
7006	CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO
7007	GUIA 4,5MM COM ROSCA
7008	GUIA 2,5MM COM ROSCA
7009	CHAVE CURVA
7010	CHAVE EM T PARA ENGATE RÁPIDO
7011	FIO COM ROSCA NA PONTA Ø 2 X 350MM
7012	PUNÇÃO Ø 7,4MM
7013	GUIA CANULADO 7,5MM CURTO
7014	TRAVE POSICIONADORA
7016	GUIA CANULADO Ø 2,5MM COM ROSCA
7017	GUIA CANULADO Ø 4,5MM COM ROSCA
7018	GUIA CANULADO Ø 7,5MM LONGO
7021	CHAVE COM ENGATE RÁPIDO Ø 3,5MM
7022	CABO AXIAL COM ENGATE RÁPIDO
7026	TAMPÃO
7043	CABO DA RASPA
7046	IMPACTOR / EXTRATOR
7048	CHAVE UNHA DE GATO
7049	GUIA DE REDUÇÃO
7053	PERFURADO FIXADOR 38
7079	IMPACTOR DE HASTE

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7081	POSICIONADOR HASTE UNION
7082	IMPACTOR ÓSSEO
7089	GUIA DE RESSECÇÃO DE PESCOÇO
7090	IMPACTOR DE ENXERTO
7091	COLO DE PROVA UNION
7092	CABO DE RASPA UNION
7093	MEDIDOR
7101	INTRODUTOR ANGULAR DE HASTE
7102	INTRODUTOR PADRÃO DE HASTE
7104	REDUTOR DE FRATURA
7105	IMPACTOR
7106	GUIA DO IMPACTOR CANULADO
7107	IMPACTOR CANULADO
7213	PINÇA COM SEXTAVADO EXTERNO Ø 2,5
7214	AJUSTADOR DE PARAFUSO
7215	INSEROR DE CLIP. CONECTOR
7216	AJUSTADOR
7217	MODELOR ESQUERDO
7218	GUIA DE BROCA AJUSTÁVEL
7219	MODELADOR DIREITO
7220	CHAVE SEXTAVADA 3,0 PARA POLIXIAL
7221	MEDIDOR
7223	GUIA DE BROCA Ø 4,0MM
7224	GUIA DE CONTRA PARAFUSO
7225	BARRA MALEÁVEL Ø 3,5 X 250MM
7228	BROCA Ø 2,5 X 154MM
7229	BROCA Ø 3,5 X 154MM
7230	MACHO GRADUADO Ø 3,5 X 170,5MM
7231	MACHO GRADUADO Ø 4,0MM
7500	CHAVE HEXAGONAL 2,0MM
7502	GUIA DE BROCA 2,0MM
7829	GUIA PARA CORTE TIBIAL CONJUGADO 7°
7909	CALÇO PARA MINIGUIA DE ALINHAMENTO AJUSTÁVEL
7910	MINIGUIA DE ALINHAMENTO AJUSTÁVEL
7911	MINIGUIA DE CORTE DISTAL
7920	GUIA DE POSIONAMENTO DISTAL 3°
7921	GUIA DE POSIONAMENTO DISTAL 0°
7929	MINIGUIA MEDIDOR FEMORAL
7931	SUORTE P APALPADOR DO GUIA
7932	POSICIONADOR DE GUIA
7938	HASTE DA PINÇA DO TORNOLEZO
7940	PINO POSICIONADOR DISTAL DE TÍBIA
7944	PINO FIXADOR DO GUIA DE CORTE DE INTERCÔNDILO
7945	HASTE DO GUIA TELESCÓPIO EXTERNO P CORTE TIBIAL
7946	GUIA TELESCÓPIO
7948	GUIA DESLIZANTE
7951	HASTE DO GUIA DE CORTE INTRAMEDULAR P CORTE TIBIAL 0°
7952	HASTE GUIA INTRAMEDULAR TIBIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7953	HASTE DO GUIA TELESCÓPIO INTRAMEDULAR P CORTE TIBIAL
7955	MEDIDOR DE CORTE TIBIAL
7962	GUIA PARA CORTE TIBIAL CONJUGADO 3°
1210/01	GUIA DE FURAÇÃO PATELAR 29/38MM
1210/02	GUIA DE FURAÇÃO PATELAR 32/35MM
1210/03	GUIA DE FURAÇÃO PATELAR Ø 38 41
1215/02	GUIA DE BROCA Ø 2,5
1215/03	GUIA DE BROCA Ø 3,2
1215/04	GUIA DE BROCA Ø 4,5
1215/05	GUIA DE BROCA Ø 1,5
1216/01	GUIA DE FURAÇÃO DO PINOSCHANZ Ø 2,5
1216/02	GUIA DE FURAÇÃO DO PINO SCHANZ Ø 3,2
1216/03	GUIA DE FURAÇÃO DO PINO SCHANZ Ø 4,8
1216/04	GUIA DE FURAÇÃO DO PINO SCHANZ Ø 6,0
1218/01	GUIA POSICIONADOR Ø 3,0
1218/02	GUIA POSICIONADOR Ø 4,0
1218/03	GUIA POSICIONADOR Ø 6,0
1218/04	GUIA POSICIONADOR Ø 14,5
1221/01	ALINHADOR
1221/02	ALINHADOR
1223/01	GUIA ADAPTADOR DO GUIA DE BROCA Ø 8,0
1223/02	GUIA ADAPTADOR DO GUIA DE BROCA Ø 10,0
1618/01	PERFURADOR PUNÇÃO PEQUENO
1619/02	GUIA PERFURADOR G
1620/01	GUIA PROTETOR PEQUENO
1620/02	GUIA PROTETOR GRANDE
1622/01	CHAVE MODELADORA DIREITA
1622/02	CHAVE MODELADORA ESQUERDA
1641/01	CHAVE DE APERTO 13MM
1641/02	CHAVE DE APERTO 24MM
1652/01	CABO DA RASPA
1671/01	GUIA DE ALINHAMENTO FEMORAL CURTO
1671/02	GUIA DE ALINHAMENTO FEMORAL LONGO
1686/01	GUIA DE CORTE FEMORAL 3°
1686/02	GUIA DE CORTE FEMORAL 5°
1686/03	GUIA DE CORTE FEMORAL DOWN
1687/01	GUIA DE CORTE DE INTERCÔNDILO C
1687/02	GUIA DE CORTE DE INTERCÔNDILO D
1687/03	GUIA DE CORTE DE INTERCÔNDILO E
1687/05	GUIA DE CORTE DE INTERCÔNDILO F
1687/06	GUIA DE CORTE DE INTERCÔNDILO G
1689/01	GUIA DE CORTE PARA FRESA TIBIAL 3
1689/02	GUIA DE CORTE PARA FRESA TIBIAL 4
1689/03	GUIA DE CORTE PARA FRESA TIBIAL 5
1689/04	GUIA DE CORTE P FRESA TIBIAL 2
1689/05	GUIA DE CORTE PARA FRESA TIBIAL 6
1689/06	GUIA DE CORTE PARA FRESA TIBIAL 7
1689/07	GUIA DE CORTE PARA FRESA TIBIAL 8

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1691/01	MEDIDOR DE ESPAÇO ARTICULAR 9MM
1691/02	MEDIDOR DE ESPAÇO ARTICULAR 10,0MM
1691/03	MEDIDOR DE ESPAÇO ARTICULAR 12,0MM
1691/04	MEDIDOR DE ESPAÇO ARTICULAR 14,0MM
1691/05	MEDIDOR DE ESPAÇO ARTICULAR 17,0MM
1691/06	MEDIDOR DE ESPAÇO ARTICULAR 20MM
1691/07	MEDIDOR DE ESPAÇO ARTICULAR 23MM
1691/08	MEDIDOR ESPAÇO ARTICULAR MINUS 3MM
1691/09	MEDIDOR ESPAÇO ARTICULAR MINUS 5MM
1698/01	GUIA DE CORTE FEMORAL ANTERO/POSTERIOR C
1698/02	GUIA DE CORTE FEMORAL ANTERO/POSTERIOR D
1698/03	GUIA DE CORTE FEMORAL ANTERO/POSTERIOR E
1698/04	GUIA DE CORTE FEMORAL ANTERO POSTERIOR B
1698/05	GUIA DE CORTE FEMORAL ANTERO/POSTERIOR F
1718/01	TORQUÍMETRO 1,3 N
1718/02	TORQUÍMETRO 0,8 N
1779/01	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 44
1779/02	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 46
1779/03	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 48
1779/04	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 50
1779/05	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 52
1779/06	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 54
1779/07	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 56MM
1779/08	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 58MM
1779/09	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 60MM
1779/10	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 62MM
1779/11	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 64
1779/12	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 66
1803/02	CHAVE PARA TORQUIMETRO
1949/01	MEDIDOR DO CAGE CERVICAL PEQUENO 6MM
1949/02	MEDIDOR DO CAGE CERVICAL MÉDIO 6MM
1949/03	MEDIDOR DO CAGE CERVICAL GRANDE 6MM
1949/04	MEDIDOR DO CAGE CERVICAL PEQUENO 5MM
1951/01	MEDIDOR DO CAGE CERVICAL PEQUENO 7MM
1951/02	MEDIDOR DO CAGE CERVICAL MÉDIO 7MM
1951/03	MEDIDOR DO CAGE CERVICAL GRANDE 7MM
1952/01	MEDIDOR DO CAGE CERVICAL PEQUENO 8MM
1952/02	MEDIDOR DO CAGE CERVICAL MÉDIO 8MM
1952/03	MEDIDOR DO CAGE CERVICAL GRANDE 8MM
1959/01	MEDIDOR DE COLO 35,5MM
1959/02	MEDIDOR DE COLO 37,5MM
1959/03	MEDIDOR DE COLO 44MM
2006/01	CHAVE EM T
2006/02	CHAVE EM 'T' SEM CABO
2011/02	EXTRATOR LONGO DE CABEÇA DE FÊMUR
2016/02	GUIA ACETABULAR RETO
2019/01	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 44MM
2019/02	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 46MM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2019/03	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 48MM
2019/04	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 50MM
2019/05	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 52MM
2019/06	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 54MM
2019/07	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 56MM
2019/08	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 58MM
2019/09	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 60MM
2019/10	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 62MM
2019/11	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 64MM
2019/12	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 66MM
2019/13	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 68MM
2019/14	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 70MM
2019/15	GUIA MEDIDOR ACETABULAR Ø 72MM
2022/01	GUIA DE CORTE 10 E 13
2022/02	GUIA DE CORTE 14 E 15
2022/03	GUIA DE CORTE 16 E 17
2022/04	GUIA DE CORTE 18
2055/01	GUIA ALINHADOR FEMORAL PROLONGADOR
2055/02	GUIA ALINHADOR FEMORAL
2075/01	CHAVE SEXTAVADA 3,5
2075/02	CHAVE SEXTAVADA 4,0
2075/03	CHAVE SEXTAVADA 3,0
2075/04	CHAVE SEXTAVADA 5,0
2081/01	AFASTADOR HOHMANN 6MM
2081/02	AFASTADOR HOHMANN 8MM
2086/01	IMPACTOR DE INSERTO 28MM SEMI ESFERA SEM ABA
2088/01	CHAVE DE APERTO DO ACETÁBULO 46 48MM
2088/02	CHAVE DE APERTO DO ACETÁBULO 50 A 62
2089/01	GUIA DE BROCA 2,5MM
2089/02	GUIA DE BROCA 3,5MM
2090/01	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 44MM
2090/02	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 46MM
2090/03	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 48MM
2090/04	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 50MM
2090/05	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 52MM
2090/06	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 54MM
2090/07	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 56MM
2090/08	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 58MM
2090/09	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 60MM
2090/10	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 62MM
2090/11	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 64MM
2090/12	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 66MM
2090/13	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 68MM
2090/14	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 70MM
2090/15	PROVA ACETABULAR COM REBORDO Ø 72MM
2107/01	MODELADOR DE PLACA
2107/02	MODELADOR DE PLACA
2108/01	CHAVE SEXTAVADA 1,5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2108/02	CHAVE SEXTAVADA 2,5
2108/03	CHAVE
2108/04	CHAVE SEXTAVADA 2,5
2108/04	CHAVE SEXTAVADA COM PINÇA
2111/01	GUIA EXPANSOR CÔNICO Ø 46MM
2111/02	GUIA EXPANSOR CÔNICO 48
2111/03	GUIA EXPANSOR CÔNICO 50
2111/04	GUIA EXPANSOR CÔNICO 52
2111/05	GUIA EXPANSOR CÔNICO 54
2111/06	GUIA EXPANSOR CÔNICO 56
2111/07	GUIA EXPANSOR CÔNICO 58
2111/08	GUIA EXPANSOR CÔNICO 60
2111/09	GUIA EXPANSOR CÔNICO 62
2113/01	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 39X Ø 22
2113/02	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 41X Ø 22
2113/03	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 43X Ø 22
2113/04	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 45X Ø 28
2113/05	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 47X Ø 28
2113/06	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 49X Ø 28
2113/07	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 51X Ø 28
2113/08	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 54X Ø 28
2113/09	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 40X Ø 22
2113/10	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 2X Ø 22
2113/11	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 44X Ø 22
2113/12	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 46X Ø 28
2113/13	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 48X Ø 28
2113/14	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 50X Ø 28
2113/15	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 52X Ø 28
2113/16	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 39X Ø 28
2113/17	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 41X Ø 28
2113/18	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 43X Ø 28
2113/19	MEDIDOR DE CÁPSULAS 54MM
2113/20	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 56X Ø 28
2113/21	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 58 X Ø 28
2113/22	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 40X Ø 28
2113/23	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 42X Ø 28
2113/24	MEDIDOR DE CÁPSULA BIPOLAR Ø 44X Ø 28
2114/01	MEDIDOR DE PROVA Ø 22 MÉDIO
2114/02	MEDIDOR DE PROVA Ø 22 LONGO
2114/03	MEDIDOR DE PROVA Ø 22 EXTRA LONGO
2114/05	MEDIDOR METÁLICO DE CABEÇA 22 M
2114/06	MEDIDOR METÁLICO DE CABEÇA 22 L
2115/01	MEDIDOR DE PROVA Ø 28 CURTO
2115/02	MEDIDOR DE PROVA Ø 28 MÉDIO
2115/03	MEDIDOR DE PROVA Ø 28 LONGO
2115/04	CABEÇA DE PROVA Ø 32 CURTA
2115/05	CABEÇA DE PROVA Ø 32 MÉDIO
2115/06	CABEÇA DE PROVA Ø 32 LONGA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2115/10	MEDIDOR METÁLICO DE CABEÇA 28 CURTO
2115/11	MEDIDOR METÁLICO DE CABEÇA 28 MÉDIO
2115/12	MEDIDOR METÁLICO DE CABEÇA 28 LONGO
2116/01	COLO DE PROVA 10 A 14
2116/01	MEDIDOR 10 A 14
2116/02	COLO DE PROVA 15 A 18
2116/02	MEDIDOR 15 A 18
2116/03	MEDIDOR 16 A 17
2116/04	MEDIDOR 18
2119/01	MEDIDOR FEMORAL 7,5
2119/02	MEDIDOR FEMORAL 10,0
2119/03	MEDIDOR FEMORAL 12,5
2119/04	MEDIDOR FEMORAL 15,0
2119/05	MEDIDOR FEMORAL 17,5
2119/06	MEDIDOR FEMORAL 20,0
2135/01	IMPACTOR EXTRATOR P PLACAS CRIANÇAS
2135/02	IMPACTOR EXTRATOR P PLACAS ADOLESCENTES
2148/01	GUIA PINO KUNTSCHER 3MM
2148/02	GUIA PINO KUNTSCHER 4MM
2148/03	GUIA PINO KUNTSCHER 5MM
2148/04	GUIA PINO KUNTSCHER 5MM
2150/01	MEDIDOR 22 MÉDIO
2150/02	MEDIDOR 22 LONGO
2151/01	MEDIDOR 28 CURTO
2151/02	MEDIDOR 28 MÉDIO
2151/03	MEDIDOR 28 LONGO
2168/01	EXTRATOR ESTRIBO STEINMANN PEQUENO 76MM
2168/02	EXTRATOR ESTRIBO STEINMANN MÉDIO 102MM
2168/03	EXTRATOR ESTRIBO STEINMANN GRANDE 108MM
2171/01	CHAVE 'T' PARA INSERÇÃO E REMOÇÃO DE FIOS
2174/01	GUIA DE BROCA 2,0
2174/02	GUIA DE BROCA 1,5
2199/01	AFASTADOR DE COBB 9,5
2199/02	AFASTADOR DE COBB 13,0
2199/03	AFASTADOR DE COBB 19,0
2215/01	AFASTADOR TAYLOR PARA COLUNA 76
2215/02	AFASTADOR TAYLOR PARA COLUNA 102
2215/03	AFASTADOR TAYLOR
2232/01	AFASTADOR LONGO 30 X 400
2232/02	AFASTADOR LONGO 45 X 400
2235/01	CHAVE COMBINADA 8
2235/02	CHAVE COMBINADA 10
2235/03	CHAVE COMBINADA 14
2235/04	CHAVE COMBINADA 12MM
2239/01	MEDIDOR 8MM
2239/02	MEDIDOR 10MM
2239/03	MEDIDOR 12MM
2239/04	MEDIDOR 14MM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2249/01	AFASTADOR HOHMANN PEQUENO
2249/02	AFASTADOR HOHMANN MÉDIO
2249/03	AFASTADOR HOHMANN GRANDE
2249/04	AFASTADOR HOHMANN 43
2249/05	AFASTADOR HOHMANN 50
2249/06	AFASTADOR HOHMANN
2250/01	AFASTADOR DE BENNETT 240X443MM
2250/02	AFASTADOR DE BENNETT 240X643MM
2288/01	CHAVE COMBINADA 7/11
2288/02	CHAVE COMBINADA ½
2343/01	CHAVE SEXTAVADA 8,0MM OST PED
2343/02	CHAVE SEXTAVADA 12,0MM OST PED
2343/03	CHAVE SEXTAVADA 9,6
2343/04	CHAVE PARA GOUFFON
2347/03	AFASTADOR OLIVER
2347/05	AFASTADOR OLIVER 4 GARRAS
2349/01	AFASTADOR VOLKMAN AGUDO 6 GARRAS
2349/02	AFASTADOR VOLKMAN ROMBO 6 GARRAS
2350/01	AFASTADOR VOLKMAN AGUDO 4 GARRAS
2350/02	AFASTADOR VOLKMAN ROMBO 4 GARRAS
2351/01	AFASTADOR VOLKMAN AGUDO 2 GARRAS
2351/02	AFASTADOR VOLKMAN ROMBO 2 GARRAS
2352/01	AFASTADOR COLINS ÓSSEO 10MM
2352/02	AFASTADOR COLINS ÓSSEO 20MM
2352/03	AFASTADOR COLINS ÓSSEO 25MM
2360/01	MARTELO 350 GRAMAS
2360/02	MARTELO 500 GRAMAS
2362/01	MARTELO 250 GRAMAS
2429/01	AFASTADOR GANCHO FEMORAL
2430/01	AFASTADOR UMERAL PEQUENO
2430/02	AFASTADOR UMERAL GRANDE
2431/01	AFASTADOR GLENÓIDE PEQUENO
2431/02	AFASTADOR GLENÓIDE GRANDE
2432/01	AFASTADOR ANTERIOR GLENÓIDE PEQUENO
2432/02	AFASTADOR ANTERIOR GLENÓIDE GRANDE
2433/01	AFASTADOR DELTÓIDE PEQUENO
2433/02	AFASTADOR DELTÓIDE GRANDE
2433/03	AFASTADOR DELTÓIDE MÉDIO
2444/01	CHAVE SEXTAVADA Ø 2,5
2444/02	CHAVE SEXTAVADA Ø 3,5
2444/03	CHAVE SEXTAVADA Ø 4,0
2463/01	GUIA DE BROCA 4,8 X 80MM
2463/02	GUIA DE BROCA 3,2 X 80MM
2465/01	GUIA DE BROCA 4,8 X 40MM
2465/02	GUIA DE BROCA 3,2 X 40MM
2537/01	GUIA DE BROCA Ø 3,6MM
2537/02	GUIA DE BROCA 8
2537/03	GUIA DE BROCA 10

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2544/01	GUIA PROTETOR UMERAL
2546/01	MEDIDOR PARA ORLOCK TIBIAL
2546/02	MEDIDOR PARA ORLOCK FEMORAL
2551/03	MEDIDOR PINO COM OLIVA 8 CM
2555/01	GUIA DE ALINHAMENTO DA PORCA P/ ESPONDILOLISTESE
2556/01	CHAVE GUIA INICIAL ESPONDIOLISTESE
2556/02	CHAVE GUIA INICIAL PARA POLIAXIAL
2564/01	CHAVE EM T LONGA P ESPONDILOLISTESE
2564/01	CHAVE EM T LONGA PARA ESPONDILOLISTESE
2573/01	MODELADOR DIREITO
2573/01	MODELADOR DIREITO
2573/02	MODELADOR ESQUERDO
2573/03	MODELADOR DIREITO ESPECIAL
2573/04	MODELADOR ESQUERDO
2573/05	MODELADOR DA HASTE DIREITO 30°
2573/06	MODELADOR DA HASTE ESQUERDO 30°
2573/07	MODELADOR DE HASTE ANGULADO DIREITO 90°
2573/08	MODELADOR DE HASTE ANGULADO ESQUERDO 90°
2576/01	CHAVE SEXTAVADA PARA GANCHO
2576/02	CHAVE SEXTAVADA PARA GANCHO
2583/02	FRESA GUIA INICIAL FEMORAL
2585/01	GUIA DE FRESA
2586/01	GUIA DO APALPADOR CURTO
2586/02	GUIA DO APALPADOR MÉDIO
2586/03	GUIA DO APALPADOR LONGO
2588/02	GUIA ORIENTADOR DO PREGO
2592/01	GUIA DO APALPADOR TIBIAL
2593/01	CHAVE CACHIMBO 5/8"
2593/02	CHAVE CACHIMBO 5/8
2602/01	CHAVE 10 COMBINADA
2619/01	GUIA BARRA MALEÁVEL 50MM
2619/02	GUIA BARRA MALEÁVEL 70MM
2619/03	GUIA BARRA MALEÁVEL 100MM
2619/04	GUIA BARRA MALEÁVEL 150MM
2619/05	GUIA BARRA MALEÁVEL 200MM
2619/06	GUIA BARRA MALEÁVEL 250MM
2619/07	GUIA BARRA MALEÁVEL 300MM
2619/08	GUIA BARRA MALEÁVEL 350MM
2619/09	GUIA BARRA MALEÁVEL 400MM
2619/10	GUIA BARRA MALEÁVEL 420MM
2622/01	GUIA DE BROCA 2,5
2622/02	GUIA DE BROCA 3,5/2,7
2632/01	GUIA AIMER 8
2632/02	GUIA AIMER 9
2632/03	GUIA AIMER 10
2632/04	GUIA AIMER 11
2632/05	GUIA AIMER 7
2635/01	GUIA DO APALPADOR CURTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2635/02	GUIA DO APALPADOR MÉDIO
2635/03	GUIA DO APALPADOR LONGO
2638/01	GUIA PROXIMAL P ORTOLOCK FEMORAL C 4 PÇS
2672/01	GUIA PARAFUSO DE FIXAÇÃO 13,0MM
2672/02	GUIA PARAFUSODE FIXAÇÃO 16,0MM
2687/01	MEDIDOR PROVA DA HASTE 7 X 150MM
2687/02	MEDIDOR PROVA DA HASTE 9 X 125MM
2687/03	MEDIDOR PROVA DA HASTE 9 X 150MM
2687/04	MEDIDOR PROVA DA HASTE 11 X 125MM
2687/05	MEDIDOR PROVA DA HASTE 11 X 150MM
2688/01	MEDIDOR CABEÇA 39MM
2688/02	MEDIDOR CABEÇA 44MM
2688/03	MEDIDOR CABEÇA 49MM
2693/01	IMPACTOR PEQUENO
2693/02	IMPACTOR MÉDIO
2693/03	IMPACTOR CANULADO
2700/01	GUIA DA FRESA ACETABULAR
2703/01	IMPACTOR 2 E 3
2703/02	IMPACTOR P/ HASTE N°P/ HASTE N 5
2703/03	IMPACTOR P/ HASTE° 1
2703/04	IMPACTOR P/ HASTE N°NMM
2703/05	IMPACTOR P/ HASTE DE CHARNLEY
2704/01	MEDIDOR ACETABULAR Ø 44
2704/02	MEDIDOR ACETABULAR Ø 46
2704/03	MEDIDOR ACETABULAR Ø 48
2704/04	MEDIDOR ACETABULAR Ø 50
2704/05	MEDIDOR ACETABULAR Ø 52MM
2704/06	MEDIDOR ACETABULAR Ø 54
2704/07	MEDIDOR ACETABULAR Ø 56
2704/08	MEDIDOR ACETABULAR Ø 58
2704/09	MEDIDOR ACETABULAR Ø 60
2704/10	MEDIDOR ACETABULAR Ø 62
2707/01	MEDIDOR DE PROVA PEQUENO
2707/02	MEDIDOR DE PROVA MÉDIO
2707/03	MEDIDOR DE PROVA GRANDE
2717/02	CHAVE 'T'
2718/01	GUIA DE PINO
2723/01	EXTRATOR DE FIO 1MM
2723/02	EXTRATOR DE FIO 2MM
2723/03	EXTRATOR DE FIO 3MM
2723/04	EXTRATOR DE FIO 4MM
2730/01	GUIA DE CORTE DE INTERCÔNDILO G
2741/01	GUIA DE CORTE FEMORAL PEQUENO
2741/02	GUIA DE CORTE FEMORAL MÉDIO
2741/03	GUIA DE CORTE FEMORAL GRANDE
2742/01	GUIA DE ALINHAMENTO DE CORTE FEMORAL 5° DIR/ESQ
2742/02	GUIA DE ALINHAMENTO DE CORTE FEMORAL 6° DIR/ESQ
2742/03	GUIA DE ALINHAMENTO DE CORTE FEMORAL 7° DIR/ESQ

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2742/04	GUIA DE ALINHAMENTO DE CORTE FEMORAL 8° DIR/ESQ
2742/05	GUIA DE ALINHAMENTO DE CORTE FEMORAL 9° DIR/ESQ
2753/01	MEDIDOR FEMORAL C/ BLOQUEIO 60 DIR
2753/02	MEDIDOR FEMORAL C/ BLOQUEIO 60 ESQ
2753/03	MEDIDOR FEMORAL C/ BLOQUEIO 65 DIR
2753/04	MEDIDOR FEMORAL C/ BLOQUEIO 65 ESQ
2753/05	MEDIDOR FEMORAL C/ BLOQUEIO 70 DIR
2753/06	MEDIDOR FEMORAL C/ BLOQUEIO 70 ESQ
2754/01	MEDIDOR FEMORAL S/ BLOQUEIO 60 DIR
2754/02	MEDIDOR FEMORAL S/ BLOQUEIO 60 ESQ
2754/03	MEDIDOR FEMORAL S/ BLOQUEIO 65 DIR
2754/04	MEDIDOR FEMORAL S/ BLOQUEIO 65 ESQ
2754/05	MEDIDOR FEMORAL S/ BLOQUEIO 70 DIR
2754/06	MEDIDOR FEMORAL S/ BLOQUEIO 70 ESQ
2760/01	GUIA DE CORTE TIBIAL 60
2760/02	GUIA DE CORTE TIBIAL 65
2760/03	GUIA DE CORTE TIBIAL 70
2760/04	GUIA DE CORTE TIBIAL PEQUENO PLUS
2760/05	GUIA DE CORTE TIBIAL MÉDIO PLUS
2760/06	GUIA DE CORTE TIBIAL GRANDE PLUS
2761/01	MEDIDOR DE PLATÔ 60 X 7
2761/02	MEDIDOR DE PLATÔ 60 X 9
2761/03	MEDIDOR DE PLATÔ 60 X 11
2761/04	MEDIDOR DE PLATÔ 60 X 13
2761/05	MEDIDOR DE PLATÔ 60 X 15
2762/01	MEDIDOR DE PLATÔ 65 X 7
2762/02	MEDIDOR DE PLATÔ 65 X 9
2762/03	MEDIDOR DE PLATÔ 65 X 11
2762/04	MEDIDOR DE PLATÔ 65 X 13
2762/05	MEDIDOR DE PLATÔ 65 X 15
2763/01	MEDIDOR DE PLATÔ 70 X 7
2763/02	MEDIDOR DE PLATÔ 70 X 9
2763/03	MEDIDOR DE PLATÔ 70 X 11
2763/04	MEDIDOR DE PLATÔ 70 X 13
2763/05	MEDIDOR DE PLATÔ 70 X 15
2771/01	MEDIDOR FEMORAL Ø 14
2771/02	MEDIDOR FEMORAL Ø 15
2771/03	MEDIDOR FEMORAL Ø 16
2771/04	MEDIDOR FEMORAL Ø 17
2771/05	MEDIDOR FEMORAL Ø 18
2771/06	MEDIDOR FEMORAL Ø 19
2771/07	MEDIDOR FEMORAL Ø 20
2771/08	MEDIDOR FEMORAL Ø 21
2771/09	MEDIDOR FEMORAL Ø 22
2771/10	MEDIDOR FEMORAL Ø 23
2771/11	MEDIDOR FEMORAL Ø 24
2831/01	GUIA REBAIXADOR DE HASTE
2834/01	CHAVE SEXTAVADA POSICIONADORA DE 4,5MM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2838/01	CHAVE GUIA INICIAL P/ ESPONDIOLISTESE
2838/01	CHAVE MONOAXIAL
2838/02	CHAVE POLIAXIAL
2838/03	CHAVE PARA PARAFUSO MONOAXIAL
2838/04	CHAVE PARA PARAFUSO POLIAXIAL
2845/01	GUIA DO PARAFUSO
2845/02	MANOPLA
2845/02	GUIA DO PARAFUSO
2845/03	CABO EM T C ENGATE RÁPIDO
2858/01	MEDIDOR DE CABEÇA 28 CURTO
2858/01	MEDIDOR DE CABEÇA Ø 28MM CURTO
2858/02	MEDIDOR DE CABEÇA 28 MÉDIO
2858/03	MEDIDOR DE CABEÇA 28 LONGO
2858/04	MEDIDOR DE CABEÇA Ø 28MM EXTRA LONGO
2858/10	MEDIDOR DE CABEÇA Ø 22 MÉDIO
2858/11	MEDIDOR DE CABEÇA DE PROVA Ø 22 LONGO
2860/01	GUIA FIO S/ OLIVA 2,9 X 505
2860/02	GUIA FIO S/ OLIVA 2,9 X 700
2860/03	GUIA FIO S/OLIVA 2,9 X 900
2860/04	GUIA FIO RETO S/ OLIVA 2,9 X 920
2860/05	GUIA FIO RETO S/ OLIVA 2,9 X 800
2860/06	GUIA FIO RETO S/ OLIVA 2,9 X 550
2860/07	GUIA FIO RETO SEM OLIVA 2,5 X 550MM
2862/01	GUIA FIO C/ OLIVA 2,9 X 505
2862/02	GUIA FIO C/ OLIVA 2,9 X 700
2862/03	GUIA FIO C/ OLIVA 2,9 X 900
2862/04	GUIA FIO C/ OLIVA 3,0 X 600
2862/05	GUIA FIO C/ OLIVA 3,0 X 550
2862/07	GUIA FIO PONTA ANGULADA COM OLIVA 2,9 X 550MM
2865/01	IMPACTOR EXTRATOR
2865/02	IMPACTOR EXTRATOR CANULADO
2876/01	MEDIDOR Ø 8
2876/02	MEDIDOR Ø 9
2876/03	MEDIDOR Ø 10
2876/04	MEDIDOR Ø 11
2876/05	MEDIDOR Ø 12
2876/06	MEDIDOR Ø 13
2894/01	CHAVE INTRODUTORA Ø 2,8MM
2894/02	CHAVE INTRODUTORA Ø 4,0MM
2894/03	CHAVE INTRODUTORA Ø 5,0MM
2914/02	GUIA DE INSERÇÃO ALUMÍNIO
2926/01	GUIA DIRECIONAL 125°
2926/02	GUIA DIRECIONAL 130°
2926/03	GUIA DIRECIONAL 135°
2951/01	GUIA INTRA FEMORAL 7,0
2951/02	GUIA INTRA FEMORAL 8,0
2951/03	GUIA INTRA FEMORAL 9,0
2951/04	GUIA INTRA FEMORAL 10,0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
2951/05	GUIA INTRA FEMORAL 11,0
2951/06	GUIA INTRA FEMORAL 12,0
2951/07	GUIA INTRA FEMORAL 7,0
2951/08	GUIA GANCHO INTRA FEMORAL 8,0
2951/09	GUIA GANCHO INTRA FEMORAL 9,0
2951/10	GUIA GANCHO INTRA FEMORAL 10,0
2951/11	GUIA GANCHO INTRA FEMORAL 11,0
2951/12	GUIA GANCHO INTRA FEMORAL 12,0
2966/01	EXTRATOR CABO COM GANCHO FECHADO
2977/01	IMPACTOR RETO
2977/02	IMPACTOR CURVO
3126/01	MODELADOR RETORCDOR
4629/01	FIO CALBRADO 2,5 X 230MM
4655/01	GUIA DO CABO PEQUENO
4655/02	GUIA DO CABO MÉDIO
4655/03	GUIA DO CABO GRANDE
4688/01	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 2,5 X 230MM
4688/02	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 3,5 X 230MM
4688/03	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 4,0 X 230MM
4688/04	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 5,0 X 230MM
4688/05	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 2,5 X 300MM
4688/06	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 3,5 X 300MM
4688/07	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 4,0 X 300MM
4688/08	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 5,0 X 300MM
4688/09	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 2,0 X 230MM
4688/10	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 1,5 X 230MM
4688/11	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 1,0 X 230MM
4688/12	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 2,0 X 300MM
4688/13	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 1,5 X 300MM
4688/14	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 1,0 X 300MM
4688/15	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 1,8 X 300MM
4688/16	FIO ROSQUEADO TROCATER Ø 4,5 X 300MM
4688/17	FIO KIRSHNER PONTA ROSQUEADA Ø 1,5 X 150MM
4688/18	FIO ROSQUEADO TROCATER C 2 PONTAS Ø 1,0 X 300MM
4688/28	FIO ROSQUEADO TROCATER C 2 PONTAS Ø 1,0 X 300MM
4688/29	FIO DE KIRSCHNER ROSQUEADO
4689/01	GUIA FIO 1,8 X 300MM COM 4 FUROS
4689/02	GUIA FIO FURADO Ø 2,2 X 300 4 FUROS
4689/03	GUIA FIO FURADO Ø 2,5 X 300 4 FUROS
4689/04	GUIA FIO FURADO Ø 1,8 X 300 3 FUROS
4689/05	GUIA FIO FURADO Ø 2,5 X 300 1 FURO
4689/06	GUIA FIO FURADO Ø 1,8 X 300 2 FUROS
4689/07	GUIA FIO FURADO Ø 1,5 X 300 1 FURO
4689/08	GUIA FIO FURADO Ø 2,0 X 300 1 FURO
4689/09	GUIA FIO FURADO Ø 2,0 X 300 2 FUROS
4689/10	GUIA FIO FURADO Ø 2,5 X 400 4 FUROS
4689/11	GUIA FIO FURADO Ø 2,5 X 300 1 FURO
4689/12	GUIA FIO FURADO Ø 2,0 X 400 2 FUROS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
4689/13	GUIA FIO FURADO Ø 2,2 X 300 4 FUROS
4689/14	GUIA FIO FURADO 2,3 X 300MM COM 4 FUROS
4689/15	GUIA FIO FURADO 2,3 X 350MM COM 4 FUROS
4689/29	FIO FURADO 1,8 X 230
4690/01	GUIA FIO Ø 1,5 X 360
4690/02	GUIA FIO Ø 1,5 X 350
4691/01	GUIA FIO Ø 2,5 X 400 RASGADO
4691/02	GUIA FIO Ø 2,2 X 400 RASGADO
4691/03	GUIA FIO Ø 2,5 X 300 RASGADO
4691/04	GUIA FIO Ø 0,8 X 400 RASGADO
4691/05	GUIA FIO Ø 2,4 X 300 RASGADO
4691/06	GUIA FIO Ø 2,4 X 400 RASGADO COM GANCHO ABERTO
4692/01	GUIA FIO 230MM
4692/02	GUIA FIO 300MM
4728/01	FIO KIRSCHNER Ø 1,0 X 230MM
4728/02	FIO KIRSCHNER Ø 1,5 X 230MM
4728/03	FIO KIRSCHNER Ø 2,0 X 230MM
4728/04	FIO KIRSCHNER Ø 1,0 X 300MM
4728/05	FIO KIRSCHNER Ø 1,5 X 300MM
4728/06	FIO KIRSCHNER Ø 2,0 X 300MM
4728/07	FIO KIRSCHNER Ø 1,8 X 230MM
4728/08	GUIA FIO Ø 1,8 X 300MM
4728/09	GUIA FIO Ø 2,5 X 230MM
4728/10	GUIA FIO Ø 2,5 X 300MM
4728/11	GUIA FIO Ø 3,0 X 300MM
4728/12	GUIA FIO Ø 1,0 X 350MM S PONTA
4728/13	GUIA FIO Ø 1,2 X 300MM S PONTA
4728/14	GUIA FIO Ø 1,5 X 150MM
4728/15	GUIA FIO Ø 2,0 X 300MM S PONTA
4728/16	GUIA FIO Ø 1,0 X 400MM
4728/17	GUIA FIO Ø 1,5 X 400MM
4728/18	GUIA FIO Ø 2,0 X 400MM
4728/19	GUIA FIO Ø 1,2 X 300MM
4728/28	GUIA FIO Ø 1,0 X 70MM
4728/29	GUIA FIO Ø 1,5 X 70MM
4728/30	GUIA FIO Ø 2,0 X 280MM
4728/32	GUIA FIO Ø 3,0 X 200MM
7011/02	FIO COM ROSCA NA PONTA Ø 2 X 300MM
7027/01	GUIA EXTERNO DE FURAÇÃO DIREITO
7028/01	MEDIDOR FEMORAL S BLOQUEIO DIREITO C
7028/02	MEDIDOR FEMORAL S BLOQUEIO ESQUER C
7029/01	MEDIDOR FEMORAL S BLOQUEIO DIREITO D
7029/02	MEDIDOR FEMORAL S BLOQUEIO ESQUER D
7030/01	MEDIDOR FEMORAL S BLOQUEIO DIREITO E
7030/02	MEDIDOR FEMORAL S BLOQUEIO ESQUER E
7031/01	MEDIDOR FEMORAL C BLOQUEIO DIREITO C
7031/02	MEDIDOR FEMORAL C BLOQUEIO ESQUER C
7032/01	MEDIDOR FEMORAL C BLOQUEIO DIREITO D

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7032/02	MEDIDOR FEMORAL C BLOQUEIO ESQUER D
7033/01	MEDIDOR FEMORAL C BLOQUEIO DIREITO E
7033/02	MEDIDOR FEMORAL C BLOQUEIO ESQUER E
7034/01	MEDIDOR COMPONENTE TIBIAL 3
7034/02	MEDIDOR COMPONENTE TIBIAL 4
7034/03	MEDIDOR COMPONENTE TIBIAL 5
7034/04	MEDIDOR TIBIAL 2
7034/05	MEDIDOR COMPONENTE TIBIAL 6
7035/01	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL SEM BLOQUEIO 3 4 X 9MM
7035/02	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL S BLOQUEIO ¾ X 10MM
7035/03	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL S BLOQUEIO ¾ X 12MM
7035/04	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL S BLOQUEIO ¾ X 14MM
7035/05	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL S BLOQUEIO ¾ X 17MM
7035/06	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL SEM BLOQUEIO C D X 20MM
7035/07	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL SEM BLOQUEIO C D X 23MM
7036/01	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL SEM BLOQUEIO 5 6 X 9MM
7036/02	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL S BLOQUEIO 5/6X10MM
7036/03	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL S BLOQUEIO 5/6X12MM
7036/04	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL S BLOQUEIO 5/6X14MM
7036/05	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL S BLOQUEIO 5/6X17MM
7036/06	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL SEM BLOQUEIO E F X 20MM
7036/07	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL SEM BLOQUEIO E F X 23MM
7037/01	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL COM BLOQUEIO 3 4 X 9MM
7037/02	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL C BLOQUEIO 3/4X10MM
7037/03	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL C BLOQUEIO 3/4X12MM
7037/04	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL C BLOQUEIO 3/4X14MM
7037/05	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL C BLOQUEIO 3/4X17MM
7037/06	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL C BLOQUEIO 3/4X20MM
7037/07	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL C BLOQUEIO 3/4X23MM
7038/01	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL COM BLOQUEIO 5 6 X 9MM
7038/02	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL C BLOQUEIO 5/6X10MM
7038/03	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL C BLOQUEIO 5/6X12MM
7038/04	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL C BLOQUEIO 5/6X14MM
7038/05	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL C BLOQUEIO 5/6X17MM
7038/06	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL C BLOQUEIO 5/6X20MM
7038/07	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL C BLOQUEIO 5/6X23MM
7039/01	MEDIDOR PATELAR 29MM
7039/02	MEDIDOR PATELAR 32MM
7039/03	MEDIDOR PATELAR 35MM
7039/04	MEDIDOR PATELAR 38MM
7039/05	MEDIDOR PATELAR 41MM
7044/01	MEDIDOR FEMORAL Ø 16 X 190
7044/02	MEDIDOR FEMORAL Ø 17 X 190
7044/03	MEDIDOR FEMORAL Ø 18 X 190
7044/04	MEDIDOR FEMORAL Ø 19 X 190
7044/05	MEDIDOR FEMORAL Ø 20 X 190
7044/06	MEDIDOR FEMORAL Ø 14 X 225
7044/07	MEDIDOR FEMORAL Ø 14 X 225

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7044/08	MEDIDOR FEMORAL Ø 14 X 225
7044/09	MEDIDOR FEMORAL Ø 15 X 225
7044/10	MEDIDOR FEMORAL Ø 16 X 225
7044/11	MEDIDOR FEMORAL Ø 17 X 225
7044/12	MEDIDOR FEMORAL Ø 18 X 225
7044/13	MEDIDOR FEMORAL Ø 19 X 225
7044/14	MEDIDOR FEMORAL Ø 20 X 225
7044/15	MEDIDOR FEMORAL Ø 14 X 265
7044/16	MEDIDOR FEMORAL Ø 15 X 265
7044/17	MEDIDOR FEMORAL Ø 16 X 265
7044/18	MEDIDOR FEMORAL Ø 17 X 265
7044/19	MEDIDOR FEMORAL Ø 18 X 265
7044/20	MEDIDOR FEMORAL Ø 19 X 265
7044/21	MEDIDOR FEMORAL Ø 20 X 265
7044/22	MEDIDOR FEMORAL Ø 21 X 265
7044/23	MEDIDOR FEMORAL Ø 22 X 265
7044/24	MEDIDOR FEMORAL Ø 23 X 265
7044/25	MEDIDOR FEMORAL Ø 24 X 265
7044/26	MEDIDOR FEMORAL Ø 25 X 265
7044/27	MEDIDOR FEMORAL Ø 26 X 265
7044/28	MEDIDOR FEMORAL Ø 21 X 225
7044/29	MEDIDOR FEMORAL Ø 22 X 225
7044/30	MEDIDOR FEMORAL Ø 23 X 225
7044/31	MEDIDOR FEMORAL Ø 24 X 225
7044/32	MEDIDOR FEMORAL Ø 25 X 225
7044/33	MEDIDOR FEMORAL Ø 26 X 225
7044/34	MEDIDOR FEMORAL Ø 27 X 225
7047/01	MEDIDOR DE COLO 7, 8, 9
7047/02	MEDIDOR DE COLO 10, 11.25, 12.5
7047/03	MEDIDOR DE COLO 13, 75
7047/04	MEDIDOR DE COLO 15
7047/05	MEDIDOR DE COLO 16, 25
7052/01	MEDIDOR FEMORAL DIREITO SEM BLOQUEIO B
7052/02	MEDIDOR FEMORAL DIREITO SEM BLOQUEIO B
7053/01	MEDIDOR FEMORAL S BLOQUEIO DIREITO F
7053/02	MEDIDOR FEMORAL S BLOQUEIO ESQUER F
7054/01	MEDIDOR FEMORAL DIREITO COM BLOQUEIO B
7054/02	MEDIDOR FEMORAL ESQUERDO COM BLOQUEIO B
7054/03	MEDIDOR Ø 9 X 12
7054/04	MEDIDOR Ø 10 X 12
7055/01	MEDIDOR FEMORAL C BLOQUEIO DIREITO F
7055/02	MEDIDOR FEMORAL C BLOQUEIO ESQUER F
7055/03	MEDIDOR Ø 9 X 14
7055/04	MEDIDOR Ø 10 X 14
7056/02	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL SEM BLOQUEIO 2 X 10MM
7056/03	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL SEM BLOQUEIO 2 X 12MM
7056/04	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL SEM BLOQUEIO 2 X 14MM
7056/05	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL SEM BLOQUEIO 2 X 17MM

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7056/06	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL SEM BLOQUEIO A B 20MM
7056/07	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL SEM BLOQUEIO A B 23MM
7057/01	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL COM BLOQUEIO 2 X 9MM
7057/02	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL COM BLOQUEIO 2 X 10MM
7057/03	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL COM BLOQUEIO 2 X 12MM
7057/04	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL COM BLOQUEIO 2 X 14MM
7057/05	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL COM BLOQUEIO 2 X 17MM
7057/06	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL COM BLOQUEIO A B X 20MM
7057/07	MEDIDOR PLATÔ TIBIAL COM BLOQUEIO A B X 23MM
7062/01	IMPACTOR DE HASTE DISTAL
7062/02	AFASTADOR DE MÓDULO
7062/03	IMPACTOR DE MÓDULO
7062/04	MANÍPULO
7062/05	PONTEIRA EXTRATORA DE HASTE DISTAL
7062/06	PONTEIRA POSICIONADORA DE PROVA DISTAL
7063/01	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 17 X 50MM
7063/02	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 17 X 60MM
7063/03	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 17 X 70MM
7063/04	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 17 X 80MM
7063/05	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 17 X 50MM OFFSET
7063/06	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 17 X 60MM OFFSET
7063/07	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 17 X 70MM OFFSET
7063/08	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 17 X 80MM OFFSET
7064/01	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 14 X 130
7064/02	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 15 X 130
7064/03	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 16 X 130
7064/04	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 17 X 130
7064/05	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 18 X 130
7064/06	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 19 X 130
7064/07	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 20 X 130
7064/08	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 14 X 160
7064/09	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 15 X 160
7064/10	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 16 X 160
7064/11	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 17 X 160
7064/12	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 18 X 160
7064/13	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 19 X 160
7064/14	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 20 X 160
7064/15	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 21 X 160
7064/16	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 22 X 160
7064/17	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 23 X 160
7064/18	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 24 X 160
7064/19	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 14 X 210
7064/20	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 15 X 210
7064/21	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 16 X 210
7064/22	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 17 X 210
7064/23	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 18 X 210
7064/24	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 19 X 210
7064/25	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 20 X 210

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
7064/26	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 21 X 210
7064/27	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 22 X 210
7064/28	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 23 X 210
7064/29	MEDIDOR DE HASTE DE FIXAÇÃO DISTAL Ø 24 X 210
7065/01	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 21,5 X 50MM
7065/02	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 21,5 X 60MM
7065/03	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 21,5 X 70MM
7065/04	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 21,5 X 80MM
7065/05	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 21,5 X 50MM OFFSET
7065/06	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 21,5 X 60MM OFFSET
7065/07	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 21,5 X 70MM OFFSET
7065/08	MEDIDOR DE MÓDULO Ø 21,5 X 80MM OFFSET
7924/01	GUIA DE FURAÇÃO ANGULAR DIREITO 0° E 3°
7924/02	GUIA DE FURAÇÃO ANGULAR ESQUERDO 0° E 3°
7924/03	GUIA DE FURAÇÃO ANGULAR ESQUERDO 5° E 7°
7924/04	GUIA DE FURAÇÃO ANGULAR DIREITO 5° E 7°
7934/01	GUIA DE CORTE INTERCONDILO 'C'
7934/02	GUIA DE CORTE INTERCONDILO 'D'
7934/03	GUIA DE CORTE INTERCONDILO 'E'
7934/04	GUIA DE CORTE INTERCONDILO 'F'
7934/05	GUIA DE CORTE INTERCONDILO 'G'
7942/01	PERFURADOR Ø 3,2 X 48MM
7942/02	PERFURADOR Ø 3,2 X 75MM
7958/01	GUIA DE CORTE TIBIAL 0° DIREITO
7958/02	GUIA DE CORTE TIBIAL 0° ESQUERDO
7958/03	GUIA DE CORTE TIBIAL 7° DIREITO
7958/04	GUIA DE CORTE TIBIAL 7° ESQUERDO

2. FORMAS DE APRESENTAÇÃO

Os INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES são fornecidos em embalagens unitárias e não estéreis, de filme de polietileno de baixa densidade, atóxico e inodoro.

Por se tratar de um material cirúrgico, o mesmo deverá ser manuseado por profissionais devidamente habilitados, segundo técnicas cirúrgicas e critérios médicos.

As Instruções de Uso estão disponíveis de forma eletrônica, na página www.ortosintese.com.br. Esta condição está informada no rótulo de cada produto. Caso necessário, o formato impresso pode ser solicitado para a empresa pelo e-mail: instrucoesdeuso@ortosintese.com.br.

3. EMBALAGEM

Os INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES são comercializados na forma não estéril, em embalagens unitárias, em estado limpo, acondicionados em sacos de polietileno de baixa densidade, atóxico e inodoro.

Para a cirurgia, os instrumentais devem ser acondicionados de forma segura e organizada, em bandejas especialmente projetadas para esta finalidade. Antes do uso, certifique-se de que os instrumentais estejam íntegros.

4. INDICAÇÕES

Os Instrumentais NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES ORTOSINTESE foram desenvolvidos para auxiliar o profissional médico em procedimentos cirúrgicos invasivos, devendo ser necessariamente conduzido por profissional habilitado, com conhecimentos da técnica cirúrgica e dos aspectos mecânicos do instrumental.

5. CONTRAINDICAÇÕES

Somente devem ser utilizados implantes de fabricação Ortosintese. O uso de componentes de outros fabricantes pode comprometer o uso e desempenho, gerando graves consequências para o paciente.

6. AVISOS E PRECAUÇÕES

- A ORTOSINTESE recomenda uma inspeção regular e cuidadosa em todo instrumental, por profissionais qualificados, substituindo ou reparando aqueles danificados;
- Os instrumentais que não tenham mais condições de uso devem ser adequadamente descartados pela instituição hospitalar. Os métodos e procedimentos de descarte dos instrumentais utilizados devem assegurar a completa descaracterização, impedindo qualquer possibilidade de sua reutilização. A descaracterização do instrumental é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como os métodos e procedimentos utilizados. A Ortosintese recomenda que tais instrumentais sejam deformados mecanicamente. Em seguida, os instrumentais devem ser identificados de forma clara e visível, indicando a sua situação, ou seja, impróprio ao uso.

7. VERIFICAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO

- Os instrumentais devem ser mantidos na embalagem original, até o momento da esterilização e uso;
- Verificar a integridade da embalagem antes da respectiva abertura para assegurar a integridade do produto. Se a embalagem estiver violada ou danificada, não devem ser utilizados;
- Nunca utilizar instrumentais danificados;
- Verificar a integridade dos componentes, após a abertura da embalagem os componentes devem estar com a superfície uniforme, livre de riscos e manchas;
- Todos os produtos da marca Ortosintese são gravados com o logotipo;
- Quedas acidentais podem danificar os componentes, sendo necessária uma verificação da integridade com relação a danos superficiais e funcionalidade do sistema. Não utilizar o componente acidentado caso apresente irregularidades superficiais, tais como deformações, riscos ou trincas, ou perda de funcionalidade.

8. CUIDADOS PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO

Os INSTRUMENTAIS NÃO ARTICULADOS NÃO CORTANTES ORTOSINTESE são fornecidos NÃO ESTÉREIS e devem ser esterilizados antes de seu uso.

Certificar-se de que apenas equipamentos validados e que procedimentos e produtos específicos para limpeza/desinfecção e esterilização sejam utilizados, que o equipamento utilizado (desinfetador, esterilizador) seja submetido à manutenção regular e inspecionado e que os parâmetros validados sejam observados durante cada ciclo.

Os parâmetros adequados dos processos de esterilização devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. Observar também os requisitos legais aplicáveis em seu país e os regulamentos de higiene aprovados pelo seu hospital. É de total responsabilidade do usuário a garantia de utilização de um processo de esterilização adequado e a verificação da esterilidade de todos os dispositivos, em qualquer fase do processo.

A Ortosintese recomenda os métodos de limpeza e esterilização descritos abaixo:

8.1. LIMPEZA MANUAL

Para reduzir o risco de infecção, é recomendado que os instrumentais sejam limpos antes da esterilização, utilizando uma solução bactericida e fungicida de largo espectro. Entretanto, deve-se observar:

- Não utilize agentes de limpeza agressivos, tais como ácidos minerais fortes (sulfúrico, nítrico etc.);
- Não use escovas de metal, polidores ou produtos abrasivos;
- Leia sempre as instruções do fabricante do agente de limpeza;
- As concentrações dos agentes de limpeza devem ser corretas;
- Utilize escova apropriada, de preferência de nylon. Nunca utilize escova de aço ou esponjas abrasivas, isto provoca ruptura da camada passivadora;

- f) Após o término da limpeza, os instrumentais devem ser secos imediatamente;
- g) A temperatura da água não pode ultrapassar a temperatura ambiente. As concentrações dos agentes de limpeza devem ser corretas.

8.2. MÁQUINAS DE LIMPEZA

Se existirem máquinas de limpeza para os instrumentais, deve-se observar:

- a) Os instrumentais cirúrgicos devem ser colocados em bandejas para não causar danos ou avarias uns aos outros;
- b) Os instrumentais cirúrgicos fabricados em materiais dissimilares devem ser limpos separadamente para evitar corrosão;
- c) O enxágue deve remover todos os agentes utilizados na limpeza;
- d) Após o término da limpeza, os instrumentais devem ser secos imediatamente.

8.3. LIMPEZA ULTRASSÔNICA

Os instrumentais cirúrgicos que forem limpos por meio de banhos ultrassônicos devem ser inicialmente desinfetados.

Deve-se observar:

- a) Os instrumentais cirúrgicos que fabricados em materiais dissimilares devem ser limpos separadamente para evitar corrosão;
- b) Enxágue os instrumentais cuidadosamente, com água, 70% a 80% de etanol aquoso ou isopropanol com tratamento ultrassônico subsequente;
- c) Após o término da limpeza, os instrumentais devem ser secos imediatamente;
- d) Se água usada contiver uma alta concentração de íons, deve ser usada água destilada.

9. ESTERILIZAÇÃO

Este produto é comercializado na forma NÃO ESTÉRIL e não deve ser usado antes de passar por um processo validado de esterilização. A esterilização deverá ser realizada em autoclave a vapor antes da cirurgia, respeitando as normas vigentes da ANVISA e do Ministério da Saúde e a norma NBR ISO 17665-1/2010 – Esterilização de produtos para saúde – Vapor Parte: 1 Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde.

Os procedimentos de esterilização, bem como a qualidade e o treinamento do pessoal envolvido neste processo, são de inteira responsabilidade do serviço de saúde e dos profissionais envolvidos.

10. CUIDADOS ESPECIAIS SOBRE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO PRODUTO MÉDICO

10.1. ARMAZENAMENTO

O armazenamento deve ser feito em local seco, a temperatura máxima de 50°C. O local de armazenamento do produto deve estar limpo, seco e iluminado de forma a manter as condições ideais de armazenamento e transporte, assim como, a sua integridade física e química.

10.2. TRANSPORTE

O transporte deve ser feito nas mesmas condições de armazenagem, com todos os cuidados de se transportar produto frágil. Os cuidados a serem tomados no transporte estão demonstrados na embalagem, assegurando assim, proteção ao produto médico desde a expedição até a entrega ao cliente.

11. PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO DESCARTE DO PRODUTO

Os instrumentais que não tenham mais condições de uso devem ser adequadamente descartados pela instituição hospitalar de acordo com as determinações da RDC 222/2018 – PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde. Os métodos e procedimentos de descarte do produto médico utilizado devem assegurar a completa descaracterização, impedindo qualquer possibilidade de sua reutilização.

A descaracterização do produto médico é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como os métodos, procedimentos utilizados e as informações para a rastreabilidade. A ORTOSINTESE recomenda que tais produtos

médicos sejam deformados mecanicamente. Em seguida, os produtos devem ser identificados de forma clara e visível, indicando a sua condição, ou seja, impróprio ao uso.

12. RASTREABILIDADE

A rastreabilidade dos instrumentais é assegurada por meio da gravação a laser da logomarca da ORTOSINTESE, referência e número de lote, no produto. Desta forma, é possível recuperar os dados de produção, matéria-prima, fornecedor e demais itens de controle de qualidade estabelecidos.

Em caso de ocorrência de evento adverso relacionado ao produto, notifique o órgão sanitário competente por meio do site da ANVISA (www.anvisa.gov.br) e informe a ORTOSINTESE pelos seus canais de atendimento: telefone (11) 3948-4000 ou e-mail sac@ortosintese.com.br.

13. INSTRUÇÕES DE USO

Os produtos da ORTOSINTESE são indicados para uso somente por profissional médico habilitado.

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do médico cirurgião, cabendo ao cirurgião a escolha final do método e dos materiais a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia.

14. MODELO DE ROTULAGEM

REF.: XXXX

LOTE: XXXXX

Registro ANVISA: 10223710080

Descrição

Nome Técnico, Nome e modelo comercial, Matéria-Prima

Quantidade: XX

Fabricado: DD/MM/AAAA

Validade: Indeterminada

Frase: "Proibido reprocessar"

Frase: "Produto não estéril"

Responsável Técnico: Carlos Macoto Nakamura – CREA SP – 0601828973



Cuidado e frase "Ver Instrução de Uso"



Fabricante



Data de Fabricação



Validade



Não reutilizar e frase "Uso Único"



Frágil, manusear com cuidado



Limite superior de temperatura



Limite de umidade

Logotipo Ortosintese, razão social, endereço, telefone, fax e site

FABRICANTE:
ORTOSINTESE IND. E COM. LTDA.
Rua Prof. Affonso José Fioravanti, 63–
Jaraguá - CEP 02.998-010
São Paulo - SP - Brasil Fone:
(005511) 3948-4000
Fax: (005511) 3948-4010
E-mail: regulatorio@ortosintese.com.br

10223710080 – Rev.08 - OUT.2025