

INSTRUÇÕES DE USO

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Nome Técnico: INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS

Nome Comercial: KIT INSTRUMENTAL PARA DUPLA MOBILIDADE

Registro ANVISA: 81202190027

2. DESCRIÇÃO

O **Kit Instrumental para Dupla Mobilidade** é fabricado para ser utilizado durante os procedimentos médicos cirúrgicos invasivos. Os componentes do Kit são produzidos em Liga de Aço Inox ASTM F899 (*Standard Specification for Stainless Steel for Surgical Instruments*) e PPSU ASTM D6394 (*Standard Classification System for and Basis for Specification for Sulfone Plastics (SP)*). Os instrumentais estão fornecidos em diversos modelos, formatos e dimensões para atender da melhor maneira possível as necessidades durante a realização dos procedimentos cirúrgicos.

Abaixo estão os modelos dos instrumentais:

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	MATÉRIA-PRIMA	INDICAÇÃO DE USO
5832/01	LINER DE PROVA FEMORAL DM ID22 / OD28	PPSU ASTM D6394	VERIFICAR ALOJAMENTO ANTES DA COLOCAÇÃO DEFINITIVA DO IMPLANTE
5832/02	LINER DE PROVA FEMORAL DM ID22 / OD32		
5832/03	LINER DE PROVA FEMORAL DM ID22 / OD36		
5832/04	LINER DE PROVA FEMORAL DM ID22 / OD40		
5832/05	LINER DE PROVA FEMORAL DM ID28 / OD36		
5832/06	LINER DE PROVA FEMORAL DM ID28 / OD40		
5832/07	LINER DE PROVA FEMORAL DM ID32 / OD40		
5839/01	LINER DE PROVA OD38 / ID22 MÉDIA	PPSU ASTM D6394	VERIFICAR ALOJAMENTO ANTES DA COLOCAÇÃO DEFINITIVA DO IMPLANTE
5839/02	LINER DE PROVA OD38 / ID22 LONGA		
5839/03	LINER DE PROVA OD40 / ID22 MÉDIA		
5839/04	LINER DE PROVA OD40 / ID22 LONGA		

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	MATÉRIA-PRIMA	INDICAÇÃO DE USO
5839/05	LINER DE PROVA OD42 / ID22 MÉDIA	PPSU ASTM D6394	VERIFICAR ALOJAMENTO ANTES DA COLOCAÇÃO DEFINITIVA DO IMPLANTE
5839/06	LINER DE PROVA OD42 / ID22 LONGA		
5839/07	LINER DE PROVA OD44 / ID22 MÉDIA		
5839/08	LINER DE PROVA OD44 / ID22 LONGA		
5839/09	LINER DE PROVA OD46 / ID22 MÉDIA		
5839/10	LINER DE PROVA OD46 / ID22 LONGA		
5839/11	LINER DE PROVA OD48 / ID28 CURTA		
5839/12	LINER DE PROVA OD48 / ID28 MÉDIA		
5839/13	LINER DE PROVA OD48 / ID28 LONGA		
5839/14	LINER DE PROVA OD50 / ID28 CURTA		
5839/15	LINER DE PROVA OD50 / ID28 MÉDIA		
5839/16	LINER DE PROVA OD50 / ID28 LONGA		
5839/17	LINER DE PROVA OD52 / ID28 CURTA		
5839/18	LINER DE PROVA OD52 / ID28 MÉDIA		
5839/19	LINER DE PROVA OD52 / ID28 LONGA		
5839/20	LINER DE PROVA OD54 / ID28 CURTA		
5839/21	LINER DE PROVA OD54 / ID28 MÉDIA		
5839/22	LINER DE PROVA OD54 / ID28 LONGA		
5839/23	LINER DE PROVA OD56 / ID28 CURTA		
5839/24	LINER DE PROVA OD56 / ID28 MÉDIA		
5839/25	LINER DE PROVA OD56 / ID28 LONGA		

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	MATÉRIA-PRIMA	INDICAÇÃO DE USO
5839/26	LINER DE PROVA OD58 / ID28 CURTA	PPSU ASTM D6394	VERIFICAR ALOJAMENTO ANTES DA COLOCAÇÃO DEFINITIVA DO IMPLANTE
5839/27	LINER DE PROVA OD58 / ID28 MÉDIA		
5839/28	LINER DE PROVA OD58 / ID28 LONGA		
5839/29	LINER DE PROVA OD60 / ID28 CURTA		
5839/30	LINER DE PROVA OD60 / ID28 MÉDIA		
5839/31	LINER DE PROVA OD60 / ID28 LONGA		
5839/32	LINER DE PROVA OD62 / ID28 CURTA		
5839/33	LINER DE PROVA OD62 / ID28 MÉDIA		
5839/34	LINER DE PROVA OD62 / ID28 LONGA		
5839/35	LINER DE PROVA OD64 / ID28 CURTA		
5839/36	LINER DE PROVA OD64 / ID28 MÉDIA		
5839/37	LINER DE PROVA OD64 / ID28 LONGA		
5839/38	LINER DE PROVA OD66 / ID28 CURTA		
5839/39	LINER DE PROVA OD66 / ID28 MÉDIA		
5839/40	LINER DE PROVA OD66 / ID28 LONGA		
5834/01	LINER DE PROVA DM ID28 EXTRA-PEQUENO	PPSU ASTM D6394	VERIFICAR ALOJAMENTO ANTES DA COLOCAÇÃO DEFINITIVA DO IMPLANTE
5834/02	LINER DE PROVA DM ID32 PEQUENO		
5834/03	LINER DE PROVA DM ID36 PEQUENO		
5834/04	LINER DE PROVA DM ID36 MÉDIO		
5834/05	LINER DE PROVA DM ID36 GRANDE		
5834/06	LINER DE PROVA DM ID40 MÉDIO		
5834/07	LINER DE PROVA DM ID40 GRANDE		

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	MATÉRIA-PRIMA	INDICAÇÃO DE USO
5826	CHAVE IMPACTORA DE ACETÁBULO DM	LIGA DE AÇO INOX ASTM F899	IMPACTAR COMPONENTES ACETABULARES
5563/01	FRESA ACETABULAR 38mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM	LIGA DE AÇO INOX ASTM F899	ABRIR ALOJAMENTO PARA A COLOCAÇÃO DEFINITIVA DO IMPLANTE
5563/02	FRESA ACETABULAR 39mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/03	FRESA ACETABULAR 40mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/04	FRESA ACETABULAR 41mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/05	FRESA ACETABULAR 42mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/06	FRESA ACETABULAR 43mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/07	FRESA ACETABULAR 44mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/08	FRESA ACETABULAR 45mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/09	FRESA ACETABULAR 46mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/10	FRESA ACETABULAR 47mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/11	FRESA ACETABULAR 48mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/12	FRESA ACETABULAR 49mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/13	FRESA ACETABULAR 50mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/14	FRESA ACETABULAR 51mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/15	FRESA ACETABULAR 52mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/16	FRESA ACETABULAR 53mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/17	FRESA ACETABULAR 54mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/18	FRESA ACETABULAR 55mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/19	FRESA ACETABULAR 56mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/20	FRESA ACETABULAR 57mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	MATÉRIA-PRIMA	INDICAÇÃO DE USO
5563/21	FRESA ACETABULAR 58mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM	LIGA DE AÇO INOX ASTM F899	ABRIR ALOJAMENTO PARA A COLOCAÇÃO DEFINITIVA DO IMPLANTE
5563/22	FRESA ACETABULAR 59mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/23	FRESA ACETABULAR 60mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/24	FRESA ACETABULAR 61mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/25	FRESA ACETABULAR 62mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/26	FRESA ACETABULAR 63mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/27	FRESA ACETABULAR 64mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/28	FRESA ACETABULAR 65mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/29	FRESA ACETABULAR 66mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/30	FRESA ACETABULAR 67mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/31	FRESA ACETABULAR 68mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/32	FRESA ACETABULAR 69mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/33	FRESA ACETABULAR 70mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/34	FRESA ACETABULAR 71mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/35	FRESA ACETABULAR 72mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/36	FRESA ACETABULAR 73mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/37	FRESA ACETABULAR 74mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/38	FRESA ACETABULAR 75mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		
5563/39	FRESA ACETABULAR 76mm PARA ACETÁBULO CIMENTADO DM		

3. FORMAS DE APRESENTAÇÃO


O **Kit Instrumental para Dupla Mobilidade** é fornecido em embalagens unitárias e não estéreis, de filme de polietileno de baixa densidade, atóxico e inodoro, ou em containers apropriados para esta função, juntamente com o rótulo de

identificação. A Instrução de Uso não está disponível na embalagem, a mesma poderá ser consultada de forma eletrônica acessando a página www.ortosintese.com.br. Esta condição está informada no rótulo de cada produto. Caso necessário, o formato impresso pode ser solicitado para a empresa pelo e-mail instrucoesdeuso@ortosintese.com.br.

PRODUTO NÃO ESTÉRIL - ESTERILIZAR ANTES DO USO



Forma de apresentação individual – imagem ilustrativa

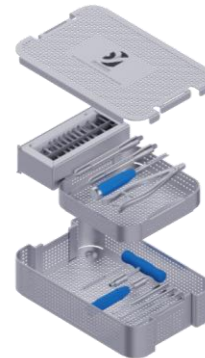

Forma de apresentação em containers – imagem ilustrativa

Por se tratar de um material cirúrgico, o **Kit Instrumental para Dupla Mobilidade** deverá ser manuseado por profissionais devidamente habilitados, segundo técnicas cirúrgicas e critérios médicos.

3.1. GRAVAÇÃO

Os componentes possuem gravação a laser, conforme norma NBR ISO 15165, contendo lote e código de referência.



III - Gravação a laser

Imagem ilustrativa para demonstrar como os componentes são apresentados após o processo de gravação a laser.

3.2. RASTREABILIDADE

A rastreabilidade é assegurada através da gravação a laser da referência e número de lote no produto. Desta forma é possível recuperar os dados de produção, fornecedor e demais itens de controle de qualidade estabelecidos pela Ortosintese.

3.3. TECNOLÓGICA

Caso ocorra algum evento adverso relacionado ao produto, notificar o órgão sanitário competente, acessando o site da ANVISA – www.anvisa.gov.br – e informar a Ortosintese pelos seus canais de atendimento ao cliente: (11) 3948-4000 ou e-mail sac@ortosintese.com.br.

4. INDICAÇÕES

Os Instrumentais foram desenvolvidos para auxiliar o profissional médico em procedimentos cirúrgicos invasivos, devendo ser necessariamente conduzidos por profissionais e equipes habilitadas e treinadas, com conhecimentos de técnicas cirúrgicas e dos aspectos mecânicos dos instrumentais. As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do profissional médico. A seleção dos instrumentais deve ser adequada ao propósito do procedimento, cabendo ao cirurgião a escolha final do método e dos materiais a serem empregados, bem como os critérios de avaliação dos resultados da cirurgia. Os instrumentais do **Kit Instrumental para Dupla Mobilidade** são indicados para uso somente por profissionais médicos e equipes habilitadas e treinadas.

5. CONTRAINDICAÇÕES

Os instrumentais do **Kit Instrumental para Dupla Mobilidade** não possuem contraindicações, no entanto, informamos que é essencial uma inspeção regular e pontual em todos os instrumentais para verificar possíveis desgastes ou deformações. Se identificados instrumentais nessas condições, os mesmos devem ser remetidos para manutenção ou substituição junto ao distribuidor.

6. EFEITOS ADVERSOS

Os instrumentais do **Kit Instrumental para Dupla Mobilidade** não possuem efeitos adversos associados ao seu uso.

7. AVISOS E PRECAUÇÕES

Os instrumentais do **Kit Instrumental para Dupla Mobilidade** podem ser reutilizados, porém advertimos os usuários quanto aos seguintes itens:

- a) Os instrumentais são submetidos ao desgaste habitual de sua utilização. Instrumentais que tenham experimentado forças excessivas, podem danificar-se. É importante salientar que estes instrumentais deverão ser utilizados exclusivamente para os fins a que foram projetados.
- b) A Ortosintese recomenda uma inspeção regular e pontual em todos os instrumentais para verificar possíveis desgastes ou deformações. Essa inspeção pode ser controlada de acordo com os critérios de manutenção estabelecidos por cada instituição. Instrumentais que apresentarem desgaste decorrente de uso deverão ser remetidos para manutenção ou substituição junto ao distribuidor.
- c) Todos os instrumentais devem ser limpos e esterilizados em autoclave a vapor antes do uso. Durante a limpeza não utilize esponjas ou agentes abrasivos.
- d) Por se tratar de um material cirúrgico, os instrumentais do **Kit Instrumental para Dupla Mobilidade** devem ser manuseados por profissionais devidamente treinados e habilitados, segundo técnicas cirúrgicas e critérios médicos.
- e) Não são permitidas adaptações nos instrumentais. Alterações no produto poderão comprometer a segurança do instrumento e causar risco ao paciente e ao profissional que o manipula.

8. VERIFICAÇÃO E MANUSEIO DO PRODUTO

- a) Os instrumentais devem ser mantidos na embalagem original, até o momento da esterilização e uso.
- b) Nunca utilizar instrumentais danificados.
- c) Verificar a integridade dos componentes, após a abertura da embalagem – os componentes devem estar com a superfície uniforme, livre de riscos e manchas.

- d) Todos os produtos da marca Ortosintese são gravados com o logotipo.
- e) Quedas acidentais podem danificar os componentes, sendo necessária uma verificação da integridade com relação a danos superficiais e funcionalidade do sistema. Não utilizar o componente acidentado caso apresente irregularidade superficial, tais como deformações, riscos ou trincas, ou perda de funcionalidade.
- f) Os instrumentais devem ser limpos e esterilizados após cada uso.

8.1. CUIDADOS PARA LIMPEZA E DESCONTAMINAÇÃO

Os instrumentais do **Kit Instrumental para Dupla Mobilidade** são fornecidos **NÃO ESTÉREIS** e devem ser esterilizados antes de cada uso.

Certificar-se que apenas equipamentos validados e que procedimentos e produtos específicos para limpeza / desinfecção e esterilização sejam utilizados, que os equipamentos utilizados sejam submetidos à manutenção regular e inspecionados, e que os parâmetros validados sejam observados durante cada ciclo.

Os parâmetros adequados dos processos de esterilização devem ser analisados e conduzidos por pessoas treinadas e especializadas em processos de esterilização, assegurando a completa eficiência desse procedimento. Observar também os requisitos legais aplicáveis e vigentes, assim como os regulamentos de higiene aprovados pelo hospital. É de total responsabilidade do usuário a garantia de utilização de um processo de esterilização adequado e a verificação da esterilidade de todos os dispositivos, em qualquer fase do processo.

A Ortosintese recomenda os métodos de limpeza e esterilização descritos abaixo:

8.1.1. LIMPEZA MANUAL

Para reduzir o risco de infecção é recomendado que os instrumentais sejam limpos antes da esterilização, utilizando uma solução bactericida e fungicida de largo espectro. Entretanto, deve-se observar:

- a) Não utilize agentes de limpeza agressivos, tais como ácidos minerais fortes (sulfúrico, nítrico etc.).
- b) Não use escovas de metal, polidores ou produtos abrasivos.
- c) Leia sempre as instruções do fabricante do agente de limpeza.
- d) As concentrações dos agentes de limpeza devem ser corretas
- e) Utilize escova apropriada, de preferência de nylon. Nunca utilize escova de aço ou esponjas abrasivas, isto provoca ruptura da camada passivadora.
- f) Após o término da limpeza, os instrumentais devem ser secos imediatamente.

8.1.2. MÁQUINAS DE LIMPEZA

Se existirem máquinas de limpeza para os instrumentais, deve-se observar:

- a) Os instrumentais cirúrgicos devem ser colocados em bandejas para não causar danos ou avarias uns aos outros.
- b) Os instrumentais cirúrgicos que são fabricados em materiais diferentes devem ser limpos separadamente para evitar corrosão.
- c) O enxágue deve remover todos os agentes utilizados na limpeza.
- d) Após o término da limpeza, os instrumentais devem ser secos imediatamente.

8.1.3. LIMPEZA ULTRASSÔNICA

Os instrumentais cirúrgicos que forem limpos através de banhos ultrassônicos devem ser inicialmente desinfetados. Deve-se observar:

- a) Os instrumentais cirúrgicos que são fabricados em materiais diferentes devem ser limpos separadamente para evitar corrosão.
- b) Enxágue os instrumentais cuidadosamente, com água, 70% a 80% de etanol aquoso ou isopropanol com tratamento ultrassônico subsequente.
- c) Após o término da limpeza, os instrumentais devem ser secos imediatamente.
- d) Se a água usada contiver uma alta concentração de íons, deve ser usada água destilada.

8.2. ESTERILIZAÇÃO

PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE

PRODUTO PASSÍVEL DE REPROCESSAMENTO

Este produto é comercializado na forma **Não Estéril** e não deve ser usado antes de passar por um processo validado de esterilização em Autoclave a vapor antes da cirurgia, respeitando as normas vigentes da ANVISA e do Ministério da Saúde e normas ABNT NBR ISO 17665-1 – Esterilização de produtos para saúde – Vapor – Parte 1: Requisitos para o desenvolvimento, validação e controle de rotina nos processos de esterilização de produtos para saúde. A esterilização dos instrumentais cirúrgicos deve ser realizada conforme método descrito na especificação abaixo:

Método	Ciclo	Temperatura	Tempo de exposição
Autoclave a Vapor	Gravitacional	134°C a 137°C – 273,2°F a 278,6°F	10 minutos

Os procedimentos de esterilização, bem como a qualidade e o treinamento do pessoal envolvido neste processo, são de inteira responsabilidade do serviço de saúde e dos profissionais envolvidos. A validação dos parâmetros do processo de esterilização de acordo com o tipo específico de equipamento disponível no hospital é extremamente importante, assim como a correta manutenção corretiva e preventiva do equipamento de esterilização.

8.2.1. PRAZO DE VALIDADE

O prazo de validade padrão deste produto é **indeterminado** a partir da data de fabricação. Contudo os instrumentais cirúrgicos não-conformes, ou que estejam fora de condições de uso, devem ser segregados, descartados e substituídos por outros da marca Ortosintese que tenham as mesmas características e função.

9. CUIDADOS ESPECIAIS SOBRE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DO PRODUTO MÉDICO

9.1. ARMAZENAMENTO

O armazenamento deve ser feito em local seco, à temperatura máxima de 25°C e umidade entre 35 e 70% UR.

O local de armazenamento deve estar limpo e seco de forma a manter as condições ideais de armazenamento, assim como a sua integridade física e química. O produto médico deve permanecer armazenado na embalagem original ou em containers de acondicionamento apropriados.

9.2. TRANSPORTE

O transporte deve ser feito nas mesmas condições de armazenamento, com todos os cuidados de se transportar um produto frágil. O transportador é informado sobre o conteúdo. Os cuidados a serem tomados no transporte estão demonstrados na embalagem, assegurando, assim, proteção ao produto médico, desde a expedição até a entrega ao cliente.

10. PROCEDIMENTOS RELACIONADOS AO DESCARTE DO PRODUTO

Os instrumentais que não tenham mais condições de uso devem ser adequadamente descartados pela instituição hospitalar de acordo com as determinações da RDC 222/2018 – PGRSS – Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde. Os métodos e procedimentos de descarte do produto médico utilizado devem assegurar sua completa descaracterização, impedindo qualquer possibilidade de sua reutilização. A descaracterização do produto médico é de inteira responsabilidade da instituição hospitalar, assim como os métodos, procedimentos utilizados e as informações para a rastreabilidade. A Ortosintese recomenda que tais produtos médicos sejam deformados mecanicamente. Em seguida, os produtos devem ser identificados de forma clara e visível, indicando a sua condição, ou seja, impróprio ao uso.

11. TEMPO DE VIDA ÚTIL

A vida útil de um instrumental depende da interação de diversos fatores. Os fatores relacionados à qualidade do produto são de responsabilidade do fabricante; alguns, como a técnica cirúrgica e a correta utilização do produto, são de responsabilidade do cirurgião. Embora os ensaios realizados pelo fabricante comprovem que a resistência mecânica dos produtos testados seja superior às cargas resultantes da utilização dos instrumentais, os instrumentais devem ser manuseados de forma a não sobrecarregar mecanicamente e seguindo as orientações da Ortosintese.

O instrumental só deve ser utilizado para a finalidade à qual foi projetado. Não realize adaptações nos instrumentais

12. MODELO DE ROTULAGEM

Os rótulos anexados aos produtos possuem as seguintes informações:

- a) Logotipo e razão social Ortosintese.
- b) Endereço, telefone e site do fabricante.
- c) Referência: XXXX.
- d) Lote: XXXXXXXXXX
- e) Quantidade: XX
- f) Modelo comercial. XXXXXXXXXXXXXXXX
- g) Nome comercial: Kit Instrumental para Dupla Mobilidade
- h) Nome técnico: Instrumentos Cirúrgicos
- i) Registro ANVISA: 81202190027
- j) Matéria-prima: XXXXXXXXXX
- k) Data de fabricação: MM/AAAA.
- l) Validade: Indeterminado.
- m) “Ver instruções de uso”.
- n) Responsável técnico: Carlos Macoto Nakamura – CREA/SP 0601828973
- o) “Instruções de Uso acesse em www.ortosintese.com.br ou instrucoesdeuso@ortosintese.com.br”
- p) Código de barras
- q) Rótulo Rev. XX-MM/AAAA

12.1. SIMBOLOGIA

Os símbolos gráficos utilizados na rotulagem seguem a Norma NBR ISO 15223 – Dispositivos Médicos – Símbolos a serem usados em informações fornecidas pelo fabricante.

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO	SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Fabricante		Atenção
	Data de Fabricação		Frágil, Manusear com Cuidado
	Validade		Não Estéril
	Limites de umidade		Limites de temperatura
	Consultar Instruções Eletrônicas de Uso		Manter Seco

FABRICANTE:
ORTOSINTESE IND. E COM. LTDA.
 Av. Nelson Palma Travassos, nº 651 –
 Jaraguá - CEP 02.998-000
 São Paulo - SP - Brasil
 Fone: (005511) 3948-4000
 Fax: (005511) 3948-4010
 E-mail: regulatorio@ortosintese.com.br

81202190027 – Rev.00 – ABR.2026